



Uporabniški priročnik za aplikacije

Uvod

Namen aplikacij ReSound je izboljšati vašo slušno izkušnjo, saj vam omogočajo, da bolje izkoristite svoj slušni aparat ReSound.

ReSoundova inovativna tehnologija zvoka in oblika se kaže v raznovrstnih slušnih aparatih, ki skrbijo za to, da je poslušanje prijetnejša izkušnja. Slušni aparati so na voljo izključno pri avdiologih in strokovnjakih za sluh.

Aplikacije ReSound vam nudijo nove načine za nadzor, personalizacijo in pomoč pri uporabi ter tako omogočajo, da popolnoma izkoristite svoj slušni aparat ReSound.

Za več informacij in pomoč pri uporabi aplikacij obiščite spletno stran:

www.resound.com/apps


Če želite uporabljati tiskano različico tega uporabniškega priročnika, stopite v stik s podporo strankam ali preprosto natisnite ta uporabniški priročnik.



Iskanje in namestitvev aplikacije




Dostop do aplikacij za naprave iPhone, iPad in iPod touch – prenesite jih iz trgovine App Store tako, da sledite tem korakom:

1. V trgovino App Store vstopite tako, da tapnete ikono trgovine App Store  na napravi iPhone, iPad ali iPod touch.
2. V trgovini App Store, poiščite "ReSound" in ime aplikacije.
3. Če uporabljate napravo iPad, spremenite pogoje iskanja v zgornjem levem kotu na "Samo iPhone".
4. Ko ste našli aplikacijo, tapnite "Prenesi".
5. Nato tapnite "Namesti".
6. Vnesite veljaven Apple ID in geslo.
7. Po vnosu gesla se bo začel prenos in namestitev aplikacije ReSound.
8. Po prenosu boste aplikacijo našli na zaslону mobilne naprave; za odpiranje tapnite simbol aplikacije ReSound.



Dostop do aplikacij za naprave Android – prenesite jih iz trgovine Google Play tako, da sledite naslednjim korakom:

1. V trgovino Google Play vstopite tako, da tapnete ikono trgovine Play Store  na vašem telefonu Android.
2. V trgovini Google Play poiščite "ReSound" in ime aplikacije.
3. Ko ste našli aplikacijo, tapnite "Namesti" in nato "Dovoli", da aplikaciji dovolite, da dostopa do nekaterih funkcij na vašem telefonu, kot je Bluetooth.
4. Po vnosu gesla se bo začel prenos in namestitev aplikacije ReSound.
5. Ko je namestitev končana, tapnite "Odpri", da odprete aplikacijo ReSound.

Aplikacija ReSound Smart 3D™



Aplikacija ReSound Smart 3D vam ponuja najvišjo raven prijaznosti do uporabnika z zgolj enim dotikom. Nadzirajte in po meri prilagajajte nastavitve svojega slušnega aparata neposredno z vaše mobilne naprave ter tako prilagodite svojo slušno izkušnjo trenutnemu zvočnemu okolju. Vaš strokovnjak za sluh lahko posodobí programe vašega slušnega aparata na daljavo, ne da bi morali obiskati ambulanto za sluh. Aplikacija vas bo usmerjala in poučila o vseh stvareh, ki jih lahko počnete in kako to storite.

Aplikacija ReSound Smart 3D je na voljo v trgovinah App Store in Google Play.

Za uporabo aplikacije so potrebne naslednje naprave:

Slušni aparati:


- Slušni aparati ReSound Smart *: ReSound LINX 3D ali kasnejši.

Mobilne naprave:


- iPhone, iPad ali iPod touch. Aplikacija ReSound Smart 3D je združljiva tudi z napravo Apple Watch.
- Podprte naprave Android.

Obiščite naše spletno mesto za podatke o združljivosti naprav in aktualni seznam združljivih mobilnih naprav: www.resound.com/compatibility

*Preverite, ali je različica vdelane programske opreme vašega slušnega aparata posodobljena na najnovejšo različico. Vaš strokovnjak za sluh lahko izvede posodobitev vdelane programske opreme.

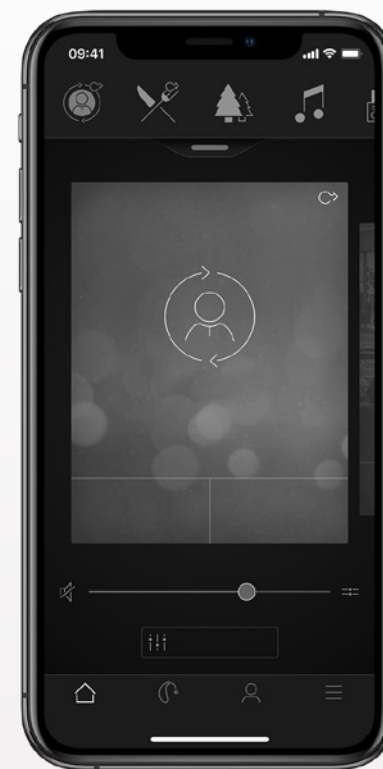

Funkcije aplikacije ReSound Smart 3D

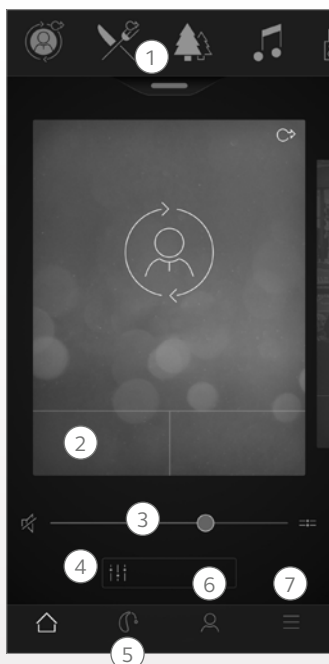

Glavni zaslon:

1. S pomočjo zgornjega vrtiljaka, **spustnega seznama** ali podrsljaja izberite svoj slušni aparat, program za pretakanje ali priljubljeno. Tapnite spustni seznam za urejanje programov in priljubljenih.

2. Uporabite **hitre gumbe** za napredne prilagoditve zvoka z zgolj enim tapom.

3. Prilagodite **glasnost** ali izklopite zvok.

4. Dostopajte do funkcije **Sound Enhancer** za prilagajanje visokih/srednjih/nizkih tonov, zmanjševanje hrupa, poudarek govora ali zmanjševanje hrupa zaradi vetra*. Dostopajte tudi do funkcije Tinnitus Manager za prilagajanje višine tonov in različice zvoka s funkcijo Tinnitus Sound Generator ali izberite svoj Nature Sound**.

5. **Meni za krmarjenje.**

6. Meni **“Moj”**:

Tukaj lahko **izveste**, kaj vse zmore aplikacija in **stopite v stik s svojim strokovnjakom za sluh***, da ga prosite za pomoč in izvedbo posodobitev nastavitve vaših slušnih aparatov.

7. Meni **“Dodatno”**:

Tukaj lahko prilagodite nastavitve aplikacije in poiščete dodatne informacije o svoji aplikaciji.

*Razpoložljivost funkcije je odvisna od modela slušnega aparata in namestitve, ki jo je izvedel vaš strokovnjak za sluh.

**Na voljo, če je vaš strokovnjak za sluh omogočil funkcijo Tinnitus Sound Generator.

Predvidena uporaba aplikacij za mobilne naprave:

Aplikacije za mobilne naprave so namenjene za uporabo z brezžičnimi slušnimi aparati. Aplikacije za mobilne naprave brezžičnim slušnim aparatom pošiljajo in od njih prejemajo signale prek mobilnih naprav, za katere so bile razvite.

CE
0297

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danska

Morebitna vprašanja glede Direktive EU 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih je treba nasloviti na GN ReSound A/S.

Aplikacija ReSound Smart™



Aplikacija ReSound Smart ponuja enak, uporabniku prijazen vmesnik kot ga zagotavlja ReSound Smart 3D, namenjen nadzoru in izvedbi prilagoditev vaših slušnih aparatov. Aplikacija se poveže s slušnimi aparati ReSound, ki ne podpirajo pomoči ReSound Assist.

Aplikacija ReSound Smart je na voljo v trgovinah App Store in Google Play.

Za uporabo aplikacije so potrebne naslednje naprave:

Slušni aparati:

- Slušni aparati ReSound Smart *: ReSound LiNX², ReSound LiNX, ReSound LiNX TS, ReSound ENZO², ReSound ENZO ali ReSound Up Smart.

Mobilne naprave:

- iPhone, iPad ali iPod touch. Aplikacija ReSound Smart je združljiva tudi z napravo Apple Watch.
- Podprte naprave Android.

Obiščite naše spletno mesto za podatke o združljivosti naprav in aktualni seznam združljivih mobilnih naprav: www.resound.com/compatibility

*Preverite, ali je različica vdelane programske opreme vašega slušnega aparata posodobljena na najnovejšo različico. Vaš strokovnjak za sluh lahko izvede posodobitev vdelane programske opreme.

Predvidena uporaba aplikacij za mobilne naprave:

Aplikacije za mobilne naprave so namenjene za uporabo z brezžičnimi slušnimi aparati. Aplikacije za mobilne naprave brezžičnim slušnim aparatom pošiljajo in od njih prejemajo signale prek mobilnih naprav, za katere so bile razvite.

CE
0297

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danska

Morebitna vprašanja glede Direktive EU 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih je treba nasloviti na GN ReSound A/S.



Aplikacija ReSound Control



Aplikacija ReSound Control vam omogoča nadzor nad vašim slušnim aparatom. V uporabi skupaj s Phone Clip+ vam aplikacija ReSound Control omogoča, da s pomočjo svoje mobilne naprave zlahka pregledujete in oddaljeno nadzirate svoj brezžični slušni aparat ReSound in druge brezžične dodatke znamke ReSound.

Aplikacija ReSound Control je na voljo v trgovinah App Store in Google Play.

Za uporabo aplikacije so potrebne naslednje naprave:

Slušni aparati:

- Brezžični slušni aparati ReSound.

Brezžični dodatki:

- ReSound Phone Clip+.

Mobilne naprave:

- iPhone, iPad ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 7 ali kasnejšim.
- Naprave Android* z operacijskim sistemom Android OS 2.3.5 ali kasnejšim.

Za čim večjo učinkovitost priporočamo, da aplikacijo ReSound Control naenkrat aktivno uporabljate samo na eni mobilni napravi.

Za več informacij obiščite www.resound.com/control



Funkcije aplikacije ReSound Control



1. **Prilagodite glasnost ali izklopite zvok** na svojih brezžičnih slušnih aparatih. Prilagodite glasnost ali izklopite zvok na svojih brezžičnih dodatkih.

2. S pomočjo namenskega **zaslona povezave** pregledujte povezave med aplikacijo in svojima slušnima aparatoma.

3. **Spreminjajte ročne programe in programe za pretakanje.**

Predvidena uporaba aplikacij za mobilne naprave:

Aplikacije za mobilne naprave so namenjene za uporabo z brezžičnimi slušnimi aparati. Aplikacije za mobilne naprave brezžičnim slušnim aparatom pošiljajo in od njih prejemajo signale prek mobilnih naprav, za katere so bile razvite.

CE
0297

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danska

Morebitna vprašanja glede Direktive EU 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih je treba nasloviti na GN ReSound A/S.

Aplikacija ReSound Relief™



Aplikacija ReSound Relief vam ponuja uravnoteženo in prilagodljivo obvladovanje tinitusa. Kombinacija zvokov in sproščujočih vaj odvrta pozornost možganov od tinitusa. Sčasoma se možgani naučijo, da se manj osredotočajo na tinitus. Aplikacija poleg tega s pomočjo sedmih veščin za obvladovanje te tegobe podaja uporabne nasvete za soočanje z in razumevanje tinitusa.

Aplikacija je namenjena vsakomur, ki trpi za tinitusom. Uporabljati jo je treba v kombinaciji s programom za obvladovanje tinitusa ali načrtom zdravljenja, ki ga je sestavil strokovnjak za sluh.

Aplikacija ReSound Relief je na voljo v trgovinah App Store in Google Play.

Za uporabo aplikacije so potrebne naslednje naprave:

Slušni aparati:

- Slušni aparati ReSound Smart za neposredno pretakanje iz naprave iPhone, iPad ali iPod touch ali brezžični slušni aparati ReSound v kombinaciji z dodatkom Phone Clip+ za neposredno avdio pretakanje na napravah Android.


Mobilne naprave:

- iPhone, iPad ali iPod touch.
- Naprave Android z operacijskim sistemom Android OS 4.4 ali kasnejšim.


Slušalke z mikrofonom:

- Aplikacijo lahko uporabljate tudi z običajnimi slušalkami, povezanimi s telefonom.

Za več informacij obiščite: www.resound.com/reliefapp

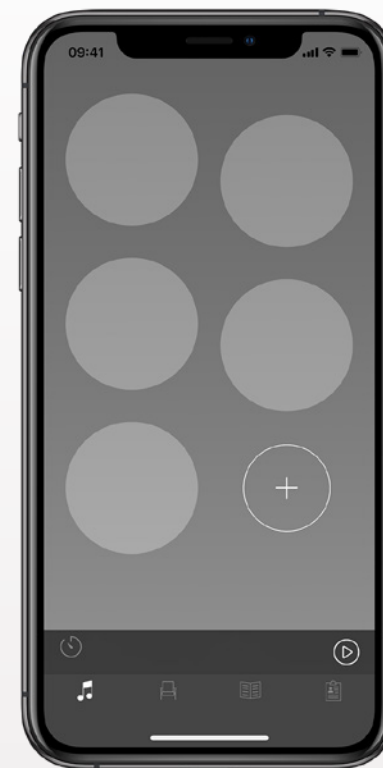

Funkcije aplikacije ReSound Relief

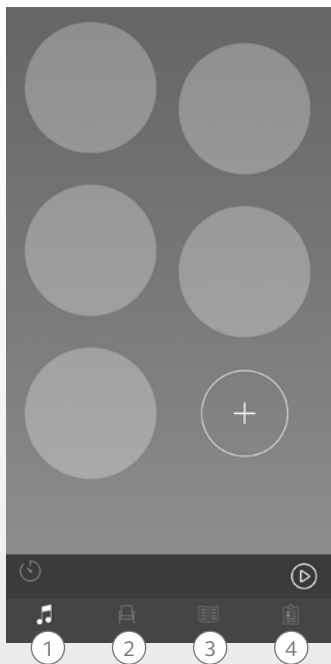

Aplikacija vam omogoča upravljanje lastne knjižnice datotek za zvočno terapijo ter izdelavo lastnih zvočnih krajin iz zvokov iz okolja in krajših glasbenih vložkov.

1. Zvočna terapija:

Poslušajte, ustvarjajte in prenašajte zvočne krajine.

2. Terapije:

Raziščite različne terapije, ki vam bodo pomagale pri sprostitvi.

3. Izvedite več:

Poiščite informacije o tinitusu.

4. Moja uporaba:

Sledite svoji uporabi aplikacije.

Predvidena uporaba aplikacije:

Namen aplikacije je zagotavljati zvočno terapijo in sproščujoče vaje, ki pozornost bolnikov s tinitusom odvrnejo od tinitusa. Lahko se uporablja kot del načrta za obvladovanje tinitusa. Ni namenjena uporabi v avdiološkem/ontološkem zdravljenju simptomatskega tinitusa ali za prekrivanje internega šumenja.



Opozorilo za preprečevanje tinitusa

Za preprečevanje izgube sluha se izogibajte dolgotrajni izpostavljenosti zelo glasnim zvokom.



GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danska

Morebitna vprašanja glede Direktive EU 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih je treba nasloviti na GN ReSound A/S.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba aplikacij z mobilnimi napravami:

Priporočamo vam, da omogočite prejemanje obvestil o posodobitvah aplikacije in namestite vse posodobitve aplikacije in operacijskega sistema, da zagotovite najvišjo možno zaščito pred ranljivostmi.

Aplikacija se lahko uporablja samo z napravami ReSound, katerim je namenjena. Družba ReSound ne sprejema odgovornosti, če aplikacijo uporabljate z drugimi napravami ali če za nadzor naprav ReSound uporabljate tretje osebe.


Uporabite samo pakete fine nastavitve na daljavo, ki ste jih pričakovali, da jih boste prejeli za svoje slušne aparate.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Če aplikacijo ReSound uporabljate s slušnim aparatom, preberite uporabniški priročnik slušnega aparata.

Uporabniški priročnik slušnega aparata je bil priložen slušnemu aparatu. Če potrebujete novega, stopite v stik z ReSoundovo podporo strankam.

Bodite pozorni na informacije, označene s simbolom za opozorilo.

 **OPOZORILO** – situacija, ki bi lahko privedla do resnih poškodb.
POZOR – situacija, ki bi lahko privedla do manjših in zmernih poškodb.



Izdelano v skladu z
Direktivo EU 93/42/EGS
o medicinskih pripomočkih:

Globalni sedež družbe

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danska

Tel.: +45 4575 1111
resound.com

Št. CVR 55082715

© 2019 GN Hearing A/S. Vse pravice pridržane. ReSound je blagovna znamka GN Hearing A/S. Apple, logotip Apple, iPhone, iPad, iPod touch in Apple Watch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google Inc. Robot Android je kopiran ali spremenjen iz dela, ki ga je ustvarila in delila družba Google ter se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v dovoljenju Creative Commons 3.0 Attribution License. Besedna znamka in logotip Bluetooth sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

ReSound GN