



ReSound GN

接続ガイド

リサウンド・スマートアプリ / リサウンド・スマート3Dアプリ

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品は対応のスマートフォンその他端末を利用して、補聴器の操作や便利な機能を使用することができます。

最新の対応端末情報は以下ウェブサイトでご確認ください。

resound.com/compatibility



アプリを使用する前にスマートフォンその他端末を補聴器とペアリングする必要があります。以下の手順に従って簡単に行えます。

iOS端末とのペアリング方法

- ①補聴器の電源オフ
- ②iOS端末の「設定」からBluetooth機能をオン
オンになるとスライダーが緑になります。



③「設定」>「アクセシビリティ」をタップ

④「ヒアリングデバイス」をタップ

⑤補聴器の電源オン

iOS端末が補聴器を検出できる状態になりました。

注意:iOS13以上(iOS12以前は「設定」>「一般」>「アクセシビリティ」>「MFiヒアリングデバイス」)

6 ペアリング



画面にお使いの「補聴器名」が表示されたら、左右(両耳の場合は「左右」両方が表示されているか)を確認後、「補聴器名」をタップします。

接続が完了すると、「補聴器名」の隣にチェックマークが入ります。「補聴器名」は黒から青に変わります。ダイアログボックスの「ペアリング」をタップします。

7 App Store上でアプリを検索



8 アプリをダウンロードして起動し、「はじめに」をタップ

9 画面の指示に従って接続してください

注意: アプリ画面右下に **デモ** と表示されている場合は「設定」をタップし、デモモードを解除してください。

Android端末とのペアリング方法

- 1 Google Play Store上でアプリを検索し、ダウンロード
- 2 アプリを起動し「はじめに」をタップ
- 3 画面の指示に従って接続してください



注意: 以前に補聴器をペアリングしたことがある場合は、再度ペアリングする前にスマートフォンのBluetoothメニューでペアリングを解除する必要があります。

iOS端末との再ペアリング方法

- 1 「設定」→「アクセシビリティ」をタップ
- 2 「ヒアリングデバイス」を選択し「このデバイスのペアリングを解除」をタップ
- 3 iOS端末を再起動後、Bluetoothがオンになっていることを確認し再ペアリング

GNヒアリングジャパン株式会社

一般のお客様電話番号  **0120-921-102**

販売店様専用電話番号  **0120-921-310**

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分（土日祝日、年末年始は休み）

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル 8F

©2020 GNヒアリングジャパン(株) Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPod touch、Apple Watch、WatchOSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Android、Google Play、Google PlayロゴはGoogle LLC.の商標です。BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



401279015 APP 14 2003A-200318K