



DRAADLOZE CONNECTIVITEIT

resound.com

## ReSound Micro Mic

### Van start...

SNELGIDS VOOR RESOUND

MICRO MIC



## VAN START

(Laad de Micro Mic voor gebruik eerst volledig op)

1. Zet de Micro Mic aan: druk op de powerknop **A** boven op de Micro Mic totdat het indicatielampje **B** groen knippert.
2. Uw hoortoestellen paren met de Micro Mic: druk de programmaknop op uw hoortoestellen in totdat u een kort melodietje hoort.  
Controleer of de verbinding werkt door in de Micro Mic te blazen of er op te kloppen. Dit geluid hoort u als het goed is in de hoortoestellen. Hoort u niets, kijk dan bij 'Problemen oplossen' op de achterkant van deze snelgids.
3. De streaming van de Micro Mic uitschakelen: druk op de programmaknop van uw hoortoestellen. Uw hoortoestellen keren terug naar het laatst gekozen programma: u hoort één of meer piepjes.
4. Uw Micro Mic uitschakelen: druk de powerknop in totdat het indicatielampje eerst rood wordt en dan dempt.



## **B** INDICATIELAMPJE


- Licht om de 2 seconden groen op als de Micro Mic is ingeschakeld en voldoende is opgeladen.
- Licht elke seconde oranje op als hij nog maar voor minder dan 30 minuten is opgeladen.

## **G** VOLUMEREGELAAR

Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de Micro Mic om het volume aan te passen. Druk op '+' en verhoog het volume, druk op '-' en verlaag het volume. (De mute-indicator **E** knippert als u het volume

## **D** HOORTOESTELLEN

Druk op de muteknop om de Micro Mic op stil te zetten. De mute-indicator **E** licht nu elke seconde oranje op. Druk nogmaals op de muteknop om het geluid weer aan te zetten. De mute-indicator stopt met knippen.

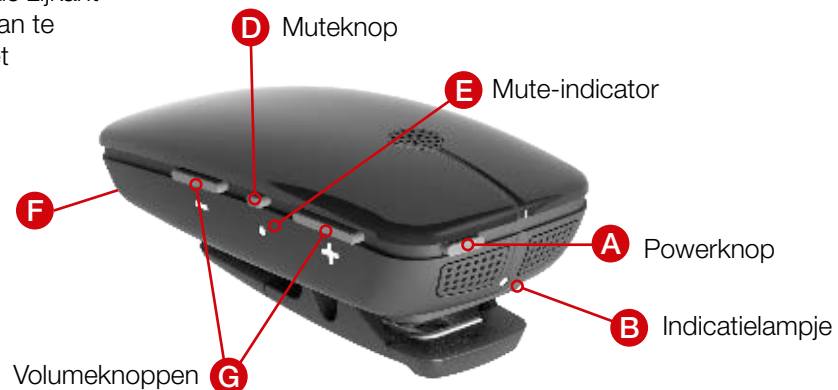

## **F** OPLADEN

- Steek de oplader in de micro-USB aan de onderzijde van uw Micro Mic.
- Indicatielampje knippert als volgt bij opladen:



Status	Tijdens opladen	Volledig opgeladen
Power uit		
Power aan		

## PAIREN VAN UW HOORTOESTELLEN MET DE MICRO MIC

(Uw hoorspecialist doet dit gewoonlijk voor u bij aanschaf)

1. Druk de powerknop op de Micro Mic in tot het indicatielampje groen brandt. De Micro Mic is nu ingeschakeld.
2. Druk met de punt van een pen of iets dergelijks de pairingknop (📶) op de achterkant van de Micro Mic één keer in. (zit de pairingknop onder de bevestigingsklem, draai deze dan een kwartslag. Het indicatielampje knippert nu oranje.
3. Uw Microfoon staat nu 20 seconden lang in de pairingmodus. Open en sluit de batterijlades van uw hoortoestellen binnen die tijd.


Een succesvolle pairing herkent u aan een melodie in beide hoortoestellen. Ook brandt het indicatielampje dan 2 seconden lang oranje.



**Let op:** zorg dat uw hoortoestellen in het Micro Mic streamingprogramma staan als u via de Micro Mic wilt horen.

De Micro Mic zendt spraak rechtstreeks naar uw hoortoestellen. Klem hem op de kleding van de spreker of hang hem met het halskoord om de nek.

Met de Micro Mic verstaat u spraak vele malen beter, omdat hij zich dichterbij de mond van de spreker bevindt dan uw hoortoestellen.

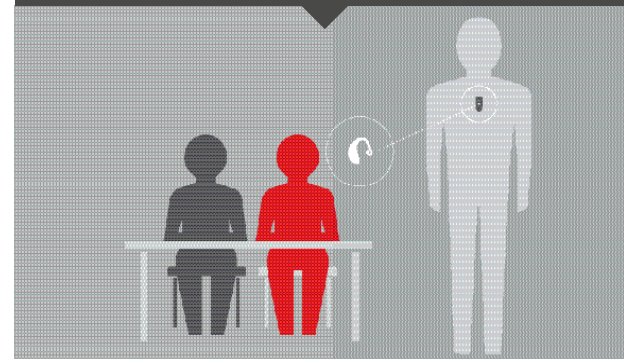

## PROBLEMEN OPLOSSEN – GEEN VERBINDING

1. **Indicatielampje:** dit lampje moet elke 2 seconden groen oplichten. Zo niet, druk dan de powerknop net zo lang in tot u een groen lampje ziet. Knippert het lampje rood of is het constant oranje, dan moet u de Micro Mic opladen.
2. **Mute-indicator:** is dit lampje oranje, dan is het geluid van de Micro Mic uitgeschakeld en wordt er geen geluidssignaal naar de hoortoestellen gezonden. Druk op de muteknop om het geluid weer in te schakelen.
3. **De batterijstatus van uw hoortoestellen:** vervang de batterijen in uw hoortoestellen. Als deze niet vol genoeg zijn, dan vangen ze het streamingsignaal soms slecht op, terwijl ze bij normaal hoortoestelgebruik nog wel prima functioneren.
4. **Als er meerdere streamingapparaten zijn gepaard:** als u ook een TV-streamer of meer dan één Micro Mic gebruikt.
  - Houd de programmaknop op uw hoortoestel ingedrukt tot u een melodietje hoort.
  - Herhaal deze stap eventueel (nog één of twee keer lang indrukken). De Micro Mic kan namelijk gepaard zijn in 'kanaal' 1, 2 of 3.
5. **Pair de Micro Mic opnieuw met uw hoortoestellen:** zie linksboven hoe u uw hoortoestellen met uw Micro Mic pairt.

### GN Hearing Benelux B.V.

Resound  
Postbus 85  
6930 AB Westervoort  
Nederland  
Tel.: +31 26 319 5000  
info@gnresound.nl  
www.resound.com

### Contactgegevens België

Tel: +32 (0)2 513 55 91  
info@gnresound.be  
www.resound.com

### Internationaal hoofdkantoor

Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Denemarken  
Tel.: +45 45 75 11 11  
www.resound.com  
CVR no. 55082715

Voor verdere instructies verwijzen wij u naar de volledige handleiding van uw Micro Mic.