

Made for
iPhone | iPad | iPod



ReSound GN
.....

ReSound ENZO Q™

Manual do Usuário

ReSound Aparelhos auditivos retroauriculares

GN Making Life Sound Better

resound.com

Informações sobre o aparelho auditivo

Aparelho auditivo esquerdo		Aparelho auditivo direito	
Número de série		Número de série	
Número do modelo		Número do modelo	
Tipo de bateria	<input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 675		

Programa	Bipe	Descrição
1	Um bipe	
2	Dois bipes	
3	Três bipes	
4	Quatro bipes	

Sumário

Apresentação	5
Seu aparelho auditivo	6
Como preparar o seu aparelho auditivo para ser utilizado	8
Como colocar os aparelhos auditivos nos ouvidos	15
Como remover os aparelhos auditivos dos ouvidos	18
Como usar os seus aparelhos auditivos	19
Entrada direta de áudio	25
Opções avançadas	29
Como limpar e manter os seus aparelhos auditivos	38
Acessórios wireless	44
Gerenciamento do zumbido	46

Advertências gerais	57
Guia para a solução de problemas	60
Aviso aos fonoaudiólogos (Apenas EUA)	63
Informações legais	66
Modelos de aparelhos auditivos	72
Especificações técnicas	73
Informações adicionais	75

Apresentação

Obrigado por escolher os nossos aparelhos auditivos. Recomendamos que use os seus aparelhos auditivos todos os dias - dessa forma, você tirará o máximo proveito deles.

OBSERVAÇÃO: Leia com atenção este manual antes de começar a usar os seus aparelhos auditivos.

Finalidade de uso

Os aparelhos auditivos genéricos de condução aérea são dispositivos de uso de amplificação sonora, projetados para compensar a perda auditiva. O princípio fundamental da operação de um aparelho auditivo é receber, amplificar e transferir o som à membrana timpânica de um indivíduo com perda auditiva.


Para dispositivos que incluem um módulo Tinnitus Sound Generator:

O Módulo Tinnitus Sound Generator é uma ferramenta que gera sons para uso em um programa de gerenciamento do zumbido, com o intuito de trazer alívio temporário aos pacientes que sofrem dessa condição. A população alvo é principalmente a população adulta acima de 18 anos de idade. Este produto também pode ser usado por crianças a partir de 12 anos.

Seu aparelho auditivo


Modelo 88

1. Molde auricular
2. tubo
3. Aberturas do microfone
4. Botão de programa
5. Controle de volume
6. Compartimento de bateria
7. Identificação de esquerda/direita
8. Fabricante

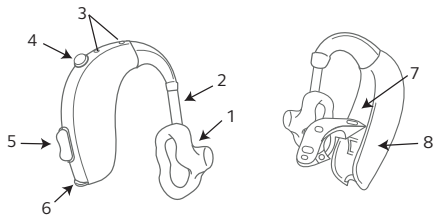

Modelo 98

1. Molde auricular
2. tubo
3. Aberturas do microfone
4. Botão de programa
5. Controle de volume
6. Trava do compartimento de bateria
7. Compartimento de bateria
8. Identificação de esquerda/direita
9. Fabricante

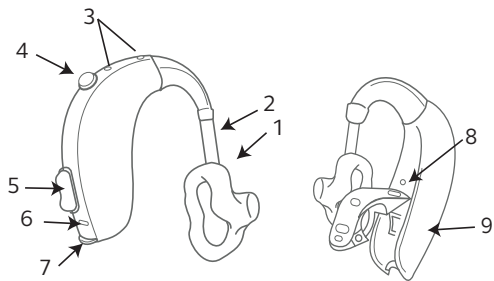

OBSERVAÇÃO: Você pode obter informações sobre o número de série e modelo do seu aparelho auditivo dentro do compartimento de bateria.

Como preparar o seu aparelho auditivo para ser utilizado

Advertências sobre a bateria



ADVERTÊNCIA: Baterias contêm substâncias perigosas e deverão ser descartadas cuidadosamente para a sua segurança e a do ambiente. Importante:

1. Mantenha as baterias longe do alcance de animais, crianças e de pessoas com deficiência intelectual.
2. NÃO coloque as baterias na boca. Caso seja ingerida uma bateria, consulte imediatamente um médico, pois pode ser prejudicial para a sua saúde.
3. Não tente recarregar baterias (zinco-ar), que não foram especificamente projetadas como recarregáveis, pois pode ocorrer vazamento ou explosão.
4. NÃO tente descartar as baterias queimando-as.
5. Baterias usadas são nocivas ao ambiente. Descarte as baterias de acordo com as regulamentações locais ou as devolva para o profissional que o(a) atendeu.

6. Para economizar a bateria, desligue seus aparelhos auditivos quando não estiverem sendo utilizados.



ADVERTÊNCIA: As baterias podem vaziar. Remova-as caso não utilize os aparelhos auditivos por períodos prolongados.





ADVERTÊNCIA: Se a pilha não for colocada corretamente, o aparelho não funcionará e a pilha poderá acumular calor. Caso isto aconteça, retire as baterias.



OBSERVAÇÃO: Sempre use baterias zinco-ar novas, com validade mínima de um ano.

Como trocar a bateria

1. Prepare a nova bateria.
Remova o adesivo de proteção para ativar a bateria e aguarde 2 minutos antes de inserir a bateria no aparelho auditivo.
2. Abra o compartimento de bateria completamente usando a unha.
3. Remova a bateria usada.
4. Insira a nova bateria com o lado positivo (+) virado para cima. Sempre insira a bateria no compartimento e nunca diretamente no aparelho auditivo.
5. Feche o compartimento de bateria.

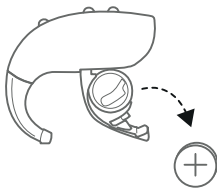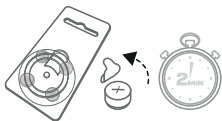



Observe o seguinte:

1. Para economizar a bateria, desligue seus aparelhos auditivos quando não estiverem sendo utilizados.
2. À noite, desligue o aparelho auditivo e abra totalmente o compartimento de bateria para permitir a evaporação da umidade. Isso aumenta a vida útil do aparelho auditivo.
3. Se perceber que o aparelho auditivo perde frequentemente a conexão com os acessórios wireless, contate o seu fonoaudiólogo para obter uma lista de baterias apropriadas.

Trava do compartimento de bateria



Se o aparelho de auditivo for destinado a uma criança ou pessoa com deficiência mental, você pode pedir ao fonoaudiólogo uma trava do compartimento de bateria. Você pode ligar e desligar o aparelho auditivo como faz normalmente, mas terá que destravar o compartimento de bateria sempre que precisar trocá-la.

Como utilizar a trava do compartimento de bateria

No modelo 88:

Como travar o compartimento de bateria:

1. Abra o compartimento de bateria colocando-o na posição "OFF".
2. Use a ferramenta que acompanha a trava do compartimento de bateria para deslizar a trava da esquerda para a direita.

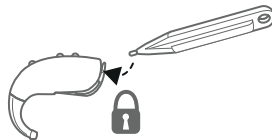
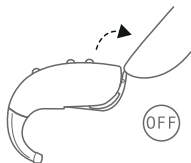


Para destravar a trava da bateria, basta repetir o procedimento, mas desta vez puxando a trava para a direita. Agora você pode trocar a bateria conforme descrito na seção "Como trocar a bateria".

No modelo 98:

Como travar o compartimento de bateria:

1. Insira a ferramenta diretamente na trava do compartimento de bateria.
2. Deslize a trava para a esquerda. Uma marca indicativa mostra que o compartimento de bateria está na posição travada (você poderá ver um ponto branco).

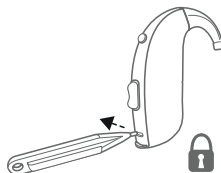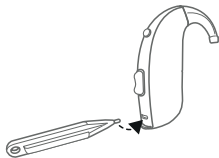


Para destravar o compartimento da bateria, basta repetir o mesmo procedimento, mas desta vez deslizando a trava para a direita. Agora você pode trocar a bateria conforme descrito na seção "Como trocar a bateria".

Advertência de bateria baixa

Quando as baterias estiverem fracas, seus aparelhos auditivos reduzirão o volume e tocarão uma melodia a cada 15 minutos, até que elas estejam totalmente esgotadas, desligando-se em seguida.

Indicador de bateria fraca quando sincronizado apenas com acessórios wireless (opcional)

As baterias acabam mais rápido ao utilizar as funcionalidades wireless, tais como a transmissão direta de seu smartphone ou a transmissão de sons de sua TV com o nosso TV Streamer. Quando as baterias acabam, o suporte de alguns acessórios wireless é desligado. A funcionalidade completa é restaurada ao inserir uma nova bateria. A tabela abaixo mostra como a funcionalidade muda com o nível da bateria.

Nível da bateria	Sinal	Aparelho auditivo	Controle remoto	Transmissão
Totalmente carregado		✓	✓	✓
Baixa		✓	✓	x
Gasta (troque a bateria)		✓	x	x

Como colocar os aparelhos auditivos nos ouvidos

Como distinguir o aparelho esquerdo do direito

Se você possui dois aparelhos auditivos, eles podem ter sido ajustados diferentemente. Um para sua orelha esquerda, outro para a sua orelha direita. Não os confunda. Preste atenção ao limpar, guardar e colocar os aparelhos.

Você pode pedir ao audiologista que o (a) atendeu que marque seus aparelhos auditivos com uma indicação de cor dos lados esquerdo e direito: Esquerdo é azul e direito é vermelho.

Como inserir o molde auricular na orelha

1. Segure o molde auricular entre os dedos polegar e indicador e posicione a sua saída de som em seu canal auditivo.
2. Deslize completamente o molde para dentro do seu ouvido, girando-o suavemente.
3. Gire a parte de cima do molde auricular delicadamente para frente e para trás, a fim de encaixar o aparelho atrás da dobra de pele do canal auditivo. Movimente o molde para baixo e para cima e pressione-o suavemente para encaixá-lo corretamente na orelha.
4. Coloque o aparelho auditivo firmemente por detrás da orelha e certifique-se de que ele está seguro.





OBSERVAÇÃO: Pode ser útil puxar sua orelha para cima e para fora com a outra mão, durante a colocação. É experimentando que você pode descobrir um método mais fácil.



CUIDADO: Nunca tente modificar por conta própria o formato do aparelho auditivo, moldes auriculares ou do tubo.

Como remover os aparelhos auditivos dos ouvidos

1. Levante o aparelho auditivo por detrás da orelha
2. Utilizando o seu polegar e dedo indicador, segure o molde auricular (não o aparelho auditivo e nem o tubo)
3. Gire e puxe cuidadosamente o molde auricular para removê-lo do ouvido


Como usar os seus aparelhos auditivos

Como ajustar o volume

Dependendo do ambiente, o seu aparelho auditivo ajusta automaticamente o volume.

No entanto, se o aparelho auditivo possuir controle de volume, você pode ajustar o volume de acordo com suas preferências.

1. Para aumentar o volume, aperte a parte superior do controle de volume.
2. Para reduzir o volume, aperte a parte inferior do controle de volume.

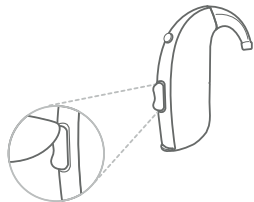

Ao mudar o volume, o aparelho auditivo reage com um bipe. Ao alcançar os limites superior ou inferior, o aparelho auditivo responde com um bipe grave.

Seu aparelho auditivo pode ser programado com uma função adicional para o controle do volume, pressionando prolongadamente o botão para baixo.

- Volume mínimo: o volume será imediatamente reduzido para o ajuste mais baixo, ou
- Mudo: o aparelho será silenciado.

Para voltar ao volume normal, pressione prolongadamente o botão para baixo.



OBSERVAÇÃO: Caso possua dois aparelhos auditivos com a função Controle de Volume Sincronizado habilitada, os ajustes do controle de volume de um aparelho auditivo se repetirão automaticamente no segundo aparelho. Quando você muda o volume em um dos aparelhos auditivos, ele responde com um ou mais bipes. Um bipe no segundo aparelho auditivo se repetirá.




OBSERVAÇÃO: O seu fonoaudiólogo pode desabilitar o controle de volume ou substituí-lo por uma tampa não funcional.

Como mudar o programa

O seu aparelho auditivo possui um botão de programas que lhe permite selecionar diferentes programas auditivos.

Aperte o botão para trocar de programa. Em seguida, você ouvirá um ou mais bipes. O número de bipes indica o programa que escolheu (um "bipe" = programa um, dois "bipes" = programa dois, etc.).

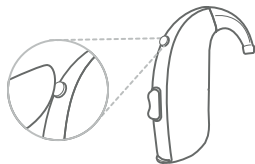

Você também pode trocar de programa por meio de alguns dos acessórios wireless e aplicativos para smartphones.

i OBSERVAÇÃO: Caso seus aparelhos auditivos possuam o Botão de Programa Sincronizado habilitado, as mudanças no programa de um aparelho se repetirão automaticamente no segundo aparelho. Após cada ajuste, ouve-se um bipe em ambos os aparelhos auditivos.


i OBSERVAÇÃO: Ao desligar os aparelhos auditivos e religá-los em seguida, eles sempre iniciam no programa 1 e no volume pré-ajustado.

Uso do telefone

Seu aparelho auditivo permite que você use o telefone normalmente. Encontrar a posição ideal para usar o telefone pode requerer prática.

As sugestões abaixo podem ser úteis:

1. Dependendo de seu status de adaptação e audição, segure o telefone no rumo do seu canal auditivo ou segure-o próximo aos microfones do aparelho auditivo, conforme mostra a ilustração
2. Se ocorrer apito, tente segurar o telefone na mesma posição por alguns segundos, pois o aparelho auditivo pode conseguir eliminar o apito
3. Segurar o telefone um pouco longe do ouvido também pode acabar com o apito

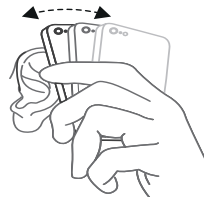



OBSERVAÇÃO: Conforme as suas necessidades individuais, o seu fonoaudiólogo pode ativar um programa especificamente para a utilização do telefone.

Bobina telefônica

Seu aparelho auditivo pode ter uma bobina telefônica. O programa de bobina telefônica pode ajudar a melhorar a compreensão de fala em telefones compatíveis com aparelhos auditivos (HAC) em teatros, cinemas, igrejas, etc. que tenham um loop de audição instalado.

Quando você seleciona o programa de bobina telefônica, o seu aparelho auditivo capta sinais do loop de audição ou do telefone HAC. O seu fonoaudiólogo pode ativar o programa de bobina telefônica.



OBSERVAÇÃO: A bobina telefônica não funciona sem um sistema de indução magnética auditiva (ou seja, circuito de indução) ou um telefone compatível com aparelho auditivo (HAC).

OBSERVAÇÃO: Caso tenha dificuldades em ouvir com o loop de audição, peça ao seu fonoaudiólogo que ajuste o programa.

OBSERVAÇÃO: Se não sair nenhum som dos aparelhos auditivos em um sistema de loop auditivo e um programa ativo de bobina telefônica, pode ser que o sistema de loop de

audição não esteja ativado ou funcionando corretamente.

OBSERVAÇÃO: O som do de loop de audição e dos microfones dos aparelhos auditivos pode ser misturado de acordo com a sua preferência. Pergunte ao seu fonoaudiólogo se isso pode ser útil para o seu caso.

Telefone HAC

Alguns smartphones são compatíveis com aparelhos auditivos (HAC). O telefone HAC estabelece uma pequena indução magnética auditiva, à qual os seus aparelhos auditivos podem se conectar. A bobina telefônica capta o sinal do telefone HAC e converte-o em som.

Para usar o telefone HAC, faça o seguinte:

1. Mude o programa do seu aparelho auditivo para o programa de bobina telefônica.
2. Pegue o telefone e faça ou receba uma chamada.
3. Mantenha o telefone próximo do aparelho auditivo e incline-o levemente para fora.
4. Ouça o tom de discagem e mova o telefone para obter a melhor recepção.
5. Se necessário, aumente o volume.
6. Ao desligar, mude para o seu programa preferido.



OBSERVAÇÃO: Se o telefone possui um sinal fraco de bobina telefônica, utilize um programa de microfone. Para evitar apito, não segure o telefone muito próximo à sua orelha.

OBSERVAÇÃO: Peça que o seu fonoaudiólogo habilite o programa de bobina telefônica em seus aparelhos auditivos.

OBSERVAÇÃO: Caso veja um “M3”, “M4”, “T3”, ou “T4” na caixa, isto significa que o smartphone possui HAC. Se achar que é difícil obter bons resultados ao usar o seu smartphone, o seu fonoaudiólogo poderá aconselhá-lo(a) sobre os acessórios wireless disponíveis para melhorar o desempenho auditivo. Consulte o seu fonoaudiólogo para mais informações sobre os smartphones HAC.

Sistemas de loop de audição

Para usar os sistemas de indução magnética, faça o seguinte:

1. Mude o programa do seu aparelho auditivo para o programa de bobina telefônica.
2. Encontre um bom local. A recepção não é clara em todos os locais; ela depende do circuito de indução. Procure por sinais ou encontre outro local.
3. Se necessário, aumente o volume.
4. Ao sair, passe para o programa 1.

Entrada direta de áudio


Você pode conectar um adaptador DAI (entrada direta de áudio) na parte inferior do aparelho auditivo. Uma vez conectado, o aparelho auditivo muda automaticamente para DAI. O som é enviado diretamente para seu aparelho auditivo por um cabo ou sistema de FM sem fio.

Se quiser ouvir o que acontece no ambiente, você pode combinar a entrada DAI aos sons detectados pelos microfones do aparelho auditivo.




OBSERVAÇÃO: A bateria do aparelho auditivo acabará mais rápido se você usar a funcionalidade DAI.


Como conectar um adaptador da DAI

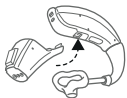

1. Alinhe a ponta do adaptador da DAI com a ranhura acima do compartimento de bateria

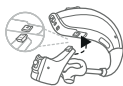


2. Mova o adaptador em direção ao compartimento de bateria.

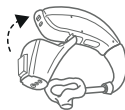

3. Encaixe o adaptador no aparelho auditivo



Como desconectar um adaptador da DAI

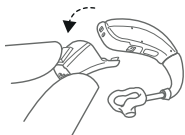

1. Remova o adaptador do aparelho auditivo e pressione a pequena trava para baixo.

Compartimento de bateria com DAI integrada

Em alguns modelos, o seu fonoaudiólogo pode substituir o compartimento de bateria convencional por um compartimento de bateria com um adaptador DAI integrado.



Para usar a funcionalidade DAI com esse tipo de adaptador, basta selecionar o programa DAI no aparelho auditivo.

Considerações importantes para sistemas de FM

1. Não utilize dois transmissores no mesmo canal de FM
2. Não utilize água ou fluidos para limpar a sapata de FM
3. Não utilize um transmissor de FM em locais em que seja proibido utilizar dispositivos eletrônicos, tais como aviões
4. Tenha em mente que os sinais transmitidos pelo FM também podem ser captados e ouvidos por outros receptores
5. Antes de usar o sistema em outro país, consulte o seu audiologista para se assegurar que seu canal é permitido naquele país

6. A sua sapata e/ou transmissor de FM só podem ser reparados por um centro de assistência autorizado

Opções avançadas

Phone Now (opcional)

Ao colocar um ímã no receptor do telefone, seus aparelhos auditivos automaticamente ativam o programa de telefone quando o receptor é colocado próximo à sua orelha. Quando o receptor se distancia da orelha, os aparelhos auditivos automaticamente retornam ao programa anterior.





OBSERVAÇÃO: Peça que o seu fonoaudiólogo habilite o Phone Now como um de seus programas.

Coloque o Phone Now ímã

Posicione o ímã no receptor do telefone para permitir a operação da função Phone Now. Para colocar o ímã corretamente:

1. Limpe bem o telefone
2. Remova o adesivo do ímã
3. Coloque o ímã

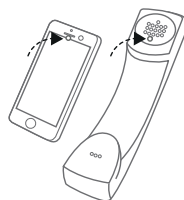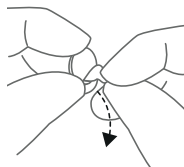

OBSERVAÇÃO: Se não estiver satisfeito com a potência do Phone Now, repositone o ímã ou acrescente mais alguns.

Antes de colocar um ímã no telefone ou celular, utilize um agente de limpeza recomendado para limpar o telefone.

Como utilizar Phone Now

1. Leve o telefone à sua orelha.

2. Ao ouvir uma melodia curta, o programa de telefone estará ativo.



OBSERVAÇÃO: Você precisará mover o receptor do telefone levemente para encontrar a melhor posição para a ativação segura do Phone Now e para uma melhor experiência auditiva ao telefone.

Caso seus aparelhos auditivos possuam a funcionalidade Comfort Phone ativada, o aparelho auditivo no ouvido sem telefone automaticamente abaixa o volume.

Peça que o seu fonoaudiólogo habilite o Phone Now como um de seus programas.

Não cubra com o ímã a abertura do altofalante.

Se programa não lhe agrada, mover o ímã para outra posição pode facilitar o uso e aumentar o conforto ao falar.

Se os aparelhos auditivos não passarem para o programa de telefone todas as vezes, você pode reposicionar o ímã ou adicionar outros.

Use um agente de limpeza recomendado.



Phone Now advertências

1. Se algum ímã for engolido, procure imediatamente um médico.

2. Mantenha os ímãs afastados de animais, crianças e pessoas com deficiências intelectuais. Se um ímã for engolido, procure um médico.
3. O ímã pode afetar alguns equipamentos médicos ou sistemas eletrônicos. Os fabricantes de alguns dispositivos magneticamente sensíveis (p. ex., marca-passos) devem adverti-lo em relação a precauções de segurança adequadas ao utilizar o aparelho auditivo e o ímã próximo aos dispositivos médicos ou sistemas eletrônicos em questão. Se o fabricante não puder emitir uma declaração, recomendamos manter o ímã, ou o telefone equipado com ímã, a 30 cm (12") de distância de equipamentos sensíveis a interferência magnética (Por exemplo, marca-passos).



Phone Now precauções

- Caso note uma perda frequente de sinal ou ruído durante as chamadas, mova o ímã para outro local do receptor do telefone
- Use somente ímãs originais fornecidos pelo fabricante.


Modo avião (opcional)

O seu aparelho auditivo lhe permite controlá-lo a partir de seu smartphone ou Controle Remoto. No entanto, em alguns locais, é necessário que você desligue as comunicações wireless.



Ao embarcar em um avião ou entrar em uma área onde transmissores RF são proibidos, a funcionalidade wireless deve ser desativada.

Faça o seguinte para desativar o modo wireless:

1. Para cada aparelho auditivo, abra e feche (abrir-fechar, abrir-fechar, abrir-fechar) o compartimento de bateria três vezes em um período de 10 segundos.
2. Sinais acústicos duplos por dez segundos ( etc.) são indicativos de que o seu aparelho auditivo está em modo avião.

Faça o seguinte para ativar o modo wireless:

1. Para cada aparelho auditivo, abra e feche uma vez o compartimento de bateria.
2. Os seus aparelhos auditivos estarão em modo wireless após 10 segundos.



OBSERVAÇÃO: Ambos os aparelhos auditivos devem ser colocados em modo avião – mesmo com a sincronização ativada.

É importante esperar outros 15 segundos após o reinício da função wireless antes que, por qualquer motivo, decida abrir e fechar novamente o compartimento de bateria. O modo avião será restabelecido caso abra e feche o compartimento de bateria durante o intervalo de 15 segundos.

Celulares

Seu aparelho auditivo cumpre os mais rigorosos padrões internacionais de Compatibilidade Eletromagnética. Qualquer nível de distúrbio pode ser devido à natureza de seu celular ou do provedor de serviços de telefonia sem fio.



OBSERVAÇÃO: Se achar difícil obter bons resultados ao usar o seu celular, o seu fonoaudiólogo poderá aconselhá-lo(a) sobre os acessórios wireless disponíveis para melhorar as capacidades auditivas.

Como utilizar os aparelhos auditivos com iPhone, iPad e iPod touch (opcional)

Os seus aparelhos auditivos são Made for iPhone, iPad e iPod touch, permitindo a transmissão direta de áudio e o controle a partir desses dispositivos.

Transmitir de um smartphone Android™

Alguns smartphones Android podem transmitir áudio diretamente para o seu aparelho auditivo. Seu dispositivo deve estar executando o sistema Android na versão 10 ou mais recente e precisa ter o recurso Android Streaming for Hearing Aids.



OBSERVAÇÃO: Para obter assistência com a sincronização e utilização destes produtos com o seus aparelhos auditivos, contate o seu fonoaudiólogo.

Como utilizar os seus aparelhos auditivos com os aplicativos para smartphones (opcional)

Os aplicativos para smartphones foram desenvolvidos para uso com os nossos aparelhos auditivos wireless. Os aplicativos para smartphones enviam e recebem sinais dos aparelhos auditivos através dos smartphones.

- Não desabilite as notificações do aplicativo
- Instale as atualizações para manter o funcionamento correto do aplicativo
- Use o app apenas com os aparelhos auditivos da mesma fabricante. Não nos responsabilizamos pelo uso do aplicativo com outros aparelhos auditivos
- Caso queira uma versão impressa do manual do usuário do aplicativo para smartphones, visite o nosso site ou consulte o nosso serviço de atendimento ao cliente.



OBSERVAÇÃO: Para assistência na sincronização e utilização destes produtos com seus aparelhos auditivos, contate seu fonoaudiólogo ou visite nosso site de suporte.



OBSERVAÇÃO: Caso o seu smartphone Android™ com Bluetooth® ativado não transmita diretamente para os aparelhos auditivos, você poderá atender o telefone se estiver usando o ReSound Phone Clip+.

ReSound Assist (opcional)

Caso tenha se inscrito para usar o ReSound Assist disponível com seus aparelhos auditivos, você pode permitir que os seus aparelhos auditivos sejam ajustados remotamente sem precisar visitar o seu fonoaudiólogo: tudo o que precisa é um smartphone com acesso à Internet. Isso lhe permite desfrutar de uma liberdade e flexibilidade jamais vistas:

1. Solicitar assistência remotamente para ajustar os seus aparelhos auditivos, para que se adapte melhor a você.
2. Manter seus aparelhos auditivos atualizados com o mais recente software, para assegurar o melhor desempenho possível.



OBSERVAÇÃO: Os seus aparelhos auditivos desligam-se durante o processo de instalação e atualização.

Para um desempenho ideal, certifique-se de que os aparelhos auditivos estão conectados ao app ReSound Smart 3D™ e colocados próximos ao iPhone, iPad, iPod touch ou smartphone Android antes de aplicar as modificações.

Este serviço só funciona se o seu dispositivo inteligente estiver conectado à Internet. O seu fonoaudiólogo lhe dará informações sobre esta opção e sobre como ela funciona com o aplicativo ReSound Smart 3D™.



Como limpar e manter os seus aparelhos auditivos

Cuidados e manutenção

Siga as instruções abaixo para ter uma melhor experiência do usuário e para prolongar a vida de seus aparelhos auditivos.

1. Mantenha seus aparelhos auditivos limpos e secos.
2. Abra o compartimento de bateria para secar os seus aparelhos auditivos quando não os estiver utilizando.
3. Após o uso, limpe os aparelhos com um pano macio para remover gordura ou umidade.
4. Não use seus aparelhos auditivos quando estiver aplicando cosméticos, perfumes, pós-barba, spray para cabelo, bronzeadores, etc. Esses produtos podem causar a descoloração do aparelho auditivo ou entrar nele, danificando-o.
5. Não mergulhe seu aparelho auditivo em qualquer tipo de líquido.
6. Mantenha os seus aparelhos auditivos longe do calor excessivo e da luz solar direta. O calor pode deformar a concha, danificar os componentes eletrônicos e estragar a superfície.
7. Não nade, tome banho ou vá à sauna quando estiver com os seus aparelhos auditivos.


Manutenção diária

i **OBSERVAÇÃO:** É importante manter os aparelhos auditivos limpos e secos. Limpe-os diariamente, usando um pano ou lenço macio. Para evitar danos causados pela umidade ou transpiração excessiva, recomenda-se o uso de um equipamento de secagem.


i **OBSERVAÇÃO:** Não use álcool ou outros solventes para limpar seus aparelhos auditivos; do contrário, o revestimento protetor será danificado.

Ferramentas de limpeza

1. Flanela.
2. Escovinha de limpeza. Use a escovinha em todas as superfícies e orifícios. Use também a escovinha para realizar a limpeza diária e manusear a bateria.
3. Fio de limpeza. Use o fio de limpeza para limpar o molde auricular.
4. Ímã. Use o ímã para levantar e substituir a bateria.

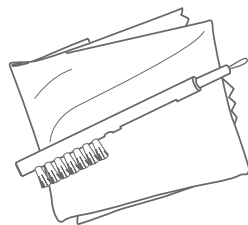

Se as entradas do microfone estiverem entupidas, escove-as cuidadosamente com a escovinha.

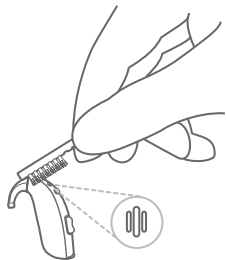


OBSERVAÇÃO: Não use o fio de limpeza para limpar as entradas do microfone. Se as entradas do microfone estiverem entupidas, peça ajuda ao fonoaudiólogo para limpá-las.

OBSERVAÇÃO: O fio de limpeza foi concebido apenas para os moldes auriculares.

Como limpar o seu aparelho auditivo


Após o uso, limpe o seu aparelho auditivo com uma flanela.

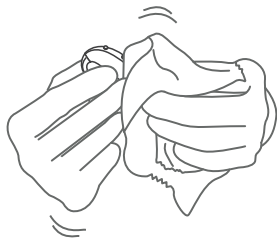

ADVERTÊNCIA: Sempre desligue os aparelhos auditivos durante a limpeza e manutenção.

O molde auricular

1. Antes de limpar, remova o molde e o tubo dos aparelhos auditivos.
2. Limpe o molde auricular com um sabão suave, enxaguando com água morna
3. Depois de limpar, seque completamente o molde auricular e remova os resquícios água e resíduos do tubo. Use um pequeno secador e um fio de limpeza.

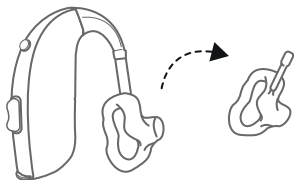

i **OBSERVAÇÃO:** O tubo do molde auricular pode ficar rígido, quebradiço ou descolorir com o passar do tempo. Para a substituição do tubo, consulte o seu fonoaudiólogo.

Como limpar um gancho metal

1. Remova o molde auricular e os tubos do gancho de metal.
2. Use um pano úmido para limpar o gancho de metal.

3. Use um sabão neutro para limpar o tubo e o molde auricular. Enxágue com água morna.
4. Seque completamente e use o bulbo para remover resquícios de água do tubo e do molde auricular.



OBSERVAÇÃO: Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza para limpar o gancho de metal pois estes podem danificar o revestimento protetor.

Acessórios wireless

A linha wireless da ReSound apresenta vários acessórios wireless perfeitamente integrados. Isto lhe permite controlar e transmitir som e voz estéreos de alta qualidade diretamente aos seus aparelhos auditivos.

Veja a lista de acessórios wireless disponíveis abaixo:

- O **ReSound TV Streamer 2** lhe permite transmitir o áudio de aparelhos de TV e de praticamente quaisquer outras fontes sonoras aos seus aparelhos auditivos, em um nível de volume adequado para você.
- **ReSound Remote Control** lhe permite ajustar o volume, silenciar os aparelhos auditivos ou mudar de programa.
- O **ReSound Remote Control 2** lhe permite ajustar o volume ou silenciar os seus aparelhos auditivos, mudar de programa e ver todos os seus ajustes realizados em um visor incrivelmente nítido.
- O **ReSound Phone Clip+** transmite conversas telefônicas e som estéreo diretamente a ambos os aparelhos auditivos, e funciona também como um controle remoto simples.
- O **ReSound Micro Mic** é um microfone colocado junto ao corpo do seu interlocutor. Ele aumenta significativamente a compreensão de fala em situações ruidosas.

- O **ReSound Multi Mic** funciona como o **ReSound Micro Mic**, mas pode também ser usado como um microfone de mesa, conectar-se com sistemas de indução magnética e FM, além de possuir uma entrada de áudio para a transmissão de áudio de seu telefone ou aparelho de som.



OBSERVAÇÃO: Consulte o seu fonoaudiólogo para obter mais informações sobre a linha de acessórios wireless ReSound.

Para o uso da funcionalidade wireless (sem fio), somente use acessórios wireless ReSound. Para mais orientações, consulte o Manual do Usuário do acessório ReSound wireless correspondente.

Gerenciamento do zumbido

Módulo Tinnitus Sound Generator

Os seus aparelhos auditivos possuem o módulo Tinnitus Sound Generator (TSG), uma ferramenta que gera sons para uso em programas de gerenciamento do zumbido, a fim de aliviar temporariamente o incômodo causado pelo mesmo. O TSG pode gerar sons ajustados às suas necessidades terapêuticas específicas e à sua preferência pessoal, conforme determinado pelo seu médico ou fonoaudiólogo. Dependendo do programa selecionado do aparelho e do ambiente em que se encontra, algumas vezes você ouvirá o som terapêutico, que se parece com um ruído contínuo ou flutuante.

Indicação de uso do módulo TSG(Apenas EUA)

O Módulo Tinnitus Sound Generator é uma ferramenta que gera sons para uso em um programa de gerenciamento do zumbido, com o intuito de trazer alívio temporário aos pacientes que sofrem dessa condição. A população alvo é principalmente a população adulta acima de 18 anos de idade. Este produto também pode ser usado por crianças a partir de 5 anos.

O Módulo Tinnitus Sound Generator foi desenvolvido aos fonoaudiólogos que tratam pacientes que sofrem de zumbido, bem como de doenças auditivas convencionais. O ajuste do Módulo Tinnitus Sound Generator deve ser feito por um fonoaudiólogo que participe de um Programa de Gerenciamento do Zumbido.

Instruções para o usuário do módulo TSG

Descrição do dispositivo

O Módulo Tinnitus Sound Generator (TSG) é uma ferramenta de software que gera sons para uso em programas de gerenciamento do zumbido, a fim de aliviar temporariamente o incômodo causado pelo mesmo.

Explicação sobre como o dispositivo funciona

O Módulo TSG é um gerador de ruído branco com modulação de frequência e amplitude. As características do nível e frequência do sinal de ruído podem ser ajustadas de acordo com as necessidades terapêuticas específicas e as suas preferências pessoais, determinadas pelo seu médico ou fonoaudiólogo.

O médico ou fonoaudiólogo pode modular o ruído a fim de torná-lo mais agradável. O ruído pode parecer, por exemplo, com o barulho de ondas quebrando na praia.

O nível e a velocidade da modulação também podem ser configurados de acordo com seus gostos e necessidades. Um recurso adicional pode ser ativado pelo seu fonoaudiólogo, que lhe permite selecionar sons pré-definidos que simulam os sons da natureza, tais como os de ondas ou de água corrente.

Caso possua dois aparelhos auditivos sem fio que sejam compatíveis com a sincronização entre ouvidos, este recurso pode ser ativado pelo seu fonoaudiólogo. Isso fará com que o Tinnitus Sound Generator sincronize-se com o som em ambos os aparelhos auditivos.

Caso seu zumbido apenas o incomode em ambientes silenciosos, seu médico ou fonoaudiólogo pode ajustar o Módulo TSG para que torne-se audível exclusivamente em tais ambientes. O nível geral do som pode ser ajustado através de um controle de volume. O seu médico ou fonoaudiólogo avaliará, juntamente com você, a necessidade de haver tal controle.

No caso de aparelhos auditivos que possuam o recurso de sincronização de orelha a orelha ativado pelo fonoaudiólogo, também é possível ativar a sincronização do monitoramento ambiental, para que o nível de ruído do TSG seja automaticamente ajustado, ao mesmo tempo, em ambos os aparelhos auditivos, dependendo do nível de som de fundo. Além disso, se o aparelho auditivo tiver um controle de volume, o nível de ruído de fundo monitorado pelo aparelho auditivo e o controle de volume podem ser usados simultaneamente, a fim de ajustar o nível de ruído gerado em ambos os aparelhos auditivos.

Conceitos científicos que constituem a base do aparelho

O Módulo TSG oferece enriquecimento sonoro, com o objetivo de envolver o zumbido em um som neutro para que ele seja facilmente ignorado. O enriquecimento sonoro é um componente importante da maioria das abordagens de gerenciamento do zumbido, como, por exemplo na Terapia de Habituação ao Zumbido (Tinnitus Retraining Therapy - TRT).

Para facilitar a habituação ao zumbido, ele precisa ser audível. O nível ideal do módulo TSG, portanto, deve ser ajustado para que comece a se misturar ao zumbido, de forma que você possa ouvir seu zumbido e o som utilizado.

Na maioria dos casos, o módulo TSG também pode ser ajustado para disfarçar o zumbido, de modo a oferecer alívio temporário ao introduzir uma fonte sonora controlável e mais agradável.

TSG controle de volume

O gerador de som é ajustado em uma altura específica pelo fonoaudiólogo. Ao ligar o gerador de som, o volume terá o ajuste ideal. Portanto, não é necessário controlar o volume (altura) manualmente. No entanto, o controle de volume oferece a capacidade de ajustar o volume ou a quantidade de estímulo, de acordo com as preferências do usuário. O volume do gerador de som para zumbido só pode ser ajustado dentro do intervalo definido pelo fonoaudiólogo.

O controle de volume é um recurso opcional no módulo TSG, utilizado para ajustar o nível de saída do gerador de som.

Uso do TSG com aplicativos para smartphones

O controle do gerador de som para zumbido, através dos botões de programas do aparelho auditivo, pode ser aprimorado através do controle wireless de um aplicativo de controle do TSG em um smartphone ou celular. Este recurso está disponível em aparelhos auditivos compatíveis, quando um fonoaudiólogo tiver ativado o recurso de TSG durante a adaptação do aparelho auditivo.



OBSERVAÇÃO: Para utilizar os aplicativos para smartphone, o aparelho auditivo deverá estar conectado ao smartphone ou ao dispositivo móvel.

Especificações técnicas

Tecnologia de sinal de áudio

Digital.

Sons disponíveis

Um sinal de ruído branco, que pode ser modulado de acordo com as seguintes configurações: O sinal de ruído branco poderá ser modulado em amplitude com uma atenuação de até 14 dB.

Filtro de agudos	Filtro de graves
500 Hz	2000 Hz
750 Hz	3000 Hz
1000 Hz	4000 Hz
1500 Hz	5000 Hz
2000 Hz	6000 Hz
-	8000 Hz



Prescrição de uso de um Tinnitus Sound Generator aparelho auditivo

O TSG deve ser utilizado conforme prescrito pelo médico, audiologista ou fonoaudiólogo. Para evitar danos auditivos permanentes, o tempo máximo de uso diário depende da intensidade do som gerado.

Para ajustar o TSG, contate o seu fonoaudiólogo.

Se houver o aparecimento de quaisquer efeitos adversos ao uso do gerador de sons, como tontura, náuseas, dores de cabeça, diminuição perceptível na função auditiva ou aumento na percepção do zumbido, o seu uso deverá ser descontinuado e o médico consultado.

Crianças e usuários com deficiências físicas ou mentais precisam ser capacitados por um médico, audiologista, fonoaudiólogo ou cuidador para a colocação e retirada do aparelho que inclui o módulo TSG.

Aviso importante aos futuros usuários do gerador de som

O dispositivo para tratamento do zumbido é um aparelho eletrônico, concebido para gerar ruídos de intensidade e largura de banda suficientes para mascarar ruídos internos. Ele também é usado como um auxílio para ouvir ruídos externos e diálogos.

As boas práticas de saúde exigem que uma pessoa com zumbido seja avaliada por um médico (preferencialmente, um especialista em doenças do ouvido) antes de utilizar um gerador de som.

Médicos que se especializam em doenças otológicas são frequentemente referidos como otorrinolaringologistas e otologistas.

O objetivo da avaliação médica é garantir que todas as doenças tratáveis que possam criar o zumbido sejam identificadas e tratadas antes da utilização do aparelho gerador de som.

O aparelho gerador de som é uma ferramenta que gera sons e que deve ser utilizada com aconselhamento adequado e/ou em um programa de gerenciamento do zumbido para aliviar o incômodo dos pacientes.



Tinnitus Sound Generator advertências

1. Os geradores de sons somente devem ser utilizados como determinado pelo médico ou fonoaudiólogo.
2. Os geradores de som não são brinquedos e devem ser mantidos longe do alcance daqueles que possam se ferir com os mesmos (especialmente crianças e animais de estimação).
3. Os geradores de som podem ser perigosos se usados incorretamente.



Tinnitus Sound Generator precauções

1. Em caso de aparecimento de efeitos colaterais pelo uso do gerador de som como, por exemplo, tontura, náusea, dores de cabeça, diminuição perceptível da audição ou aumento na percepção do zumbido, o uso do gerador de som deve ser descontinuado e um médico consultado.
2. Interrompa o uso do gerador de som e consulte imediatamente um médico licenciado caso apresentar uma das seguintes condições:
 - a. deformidade congênita visível ou traumática da orelha;
 - b. histórico de secreção do ouvido nos últimos 90 dias;
 - c. histórico de perda auditiva súbita ou progressiva rápida nos últimos 90 dias;
 - d. tontura aguda ou crônica;
 - e. perda auditiva unilateral súbita ou de início recente nos últimos 90 dias;
 - f. evidência visível de acúmulo de cerume ou corpo estranho no canal auditivo;
 - g. dor ou desconforto na orelha.

3. Interrompa o uso do gerador de som e consulte imediatamente o seu fonoaudiólogo, caso sinta alterações na percepção do zumbido, desconforto ou percepção de fala interrompida enquanto estiver usando o Tinnitus Sound Generator.
4. O controle de volume é um recurso no módulo TSG, utilizado para ajustar o nível de saída do gerador de som. Para evitar o uso acidental por crianças ou pessoas com deficiência física ou intelectual, o controle de volume deve ser configurado para oferecer apenas a diminuição do nível de saída do gerador de som.
5. Crianças e usuários com deficiência física ou intelectual necessitam de supervisão durante o uso do aparelho auditivo TSG.
6. O ajuste das configurações do Tinnitus Sound Generator usando um aplicativo para smartphones, só deve ser realizado pelos pais ou responsável legal, sempre que o usuário for menor de idade. O uso do ReSound Assist para configurar remotamente o gerador de som para zumbido só deve ser realizado pelos pais ou responsável legal, sempre que o usuário for menor de idade.



Tinnitus Sound Generator advertência aos fonoaudiólogos

O fonoaudiólogo deverá aconselhar um potencial usuário(a) do gerador de som a consultar prontamente um médico (preferencialmente um otorrinolaringologista) antes de obter tal acessório.

Caso o fonoaudiólogo detecte na anamnese, exame ou revisão de quaisquer outras informações disponíveis qualquer uma das seguintes condições relativas ao usuário:

1. deformidade congênita visível ou traumática da orelha;
2. histórico de secreção do ouvido nos últimos 90 dias;
3. histórico de perda auditiva súbita ou progressiva rápida nos últimos 90 dias;
4. tontura aguda ou crônica;
5. perda auditiva unilateral súbita ou de início recente nos últimos 90 dias;
6. Gap audiométrico aéreo-ósseo igual ou superior a 15 dB a 500 Hertz (Hz), 1.000 Hz e 2.000 Hz;
7. evidência visível de acúmulo de cerume ou corpo estranho no canal auditivo;
8. dor ou desconforto na orelha.



CUIDADO: A saída máxima do gerador de som encontra-se no limite que pode causar uma perda auditiva, de acordo com as regulamentações da OSHA (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho). De acordo com as recomendações da NIOSH, o(a) usuário (a) não deverá usar o gerador de som por mais de oito (8) horas por dia, quando este for ajustado a níveis de 85 dB NPS ou mais. Quando o gerador de som estiver ajustado em níveis de 90 dB NPS ou mais, o usuário não deve utilizar o gerador de som por mais de 2 (duas) horas por dia. Em hipótese alguma o gerador de sons deverá ser usado em níveis que causem desconforto.

Advertências gerais

1. Caso sinta irritação ou coceira no ouvido, ou perceba que há algum objeto estranho e/ou acúmulo de cerume decorrente do uso dos aparelhos, consulte o seu fonoaudiólogo
2. Diversos tipos de radiação, por exemplo tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, ressonâncias nucleares, podem danificar os aparelhos auditivos. Não é recomendado o uso dos aparelhos auditivos durante esses ou outros processos similares. Outros tipos de radiação (alarmes antirroubo, sistemas de vigilância, equipamento de rádio, telefones celulares, etc.) não danificarão o aparelho. No entanto, eles são capazes de afetar momentaneamente a qualidade do som ou criar temporariamente sons indesejados nos aparelhos auditivos
3. Não utilize o aparelho auditivo em minas ou em outras áreas explosivas, a menos que essas áreas sejam certificadas para o uso do aparelho auditivo
4. Não permita que outras pessoas utilizem seus aparelhos auditivos
5. O uso do aparelho por crianças ou pessoas com deficiência intelectual deve ocorrer sob supervisão para garantir sua segurança. O aparelho auditivo contém partes pequenas que podem ser ingeridas por algumas crianças. Não permita que crianças façam uso sem a devida supervisão
6. Os aparelhos deverão ser usados somente conforme determinado pelo fonoaudiólogo. O uso incorreto poderá resultar em perda auditiva súbita ou permanente

7. Aviso aos fonoaudiólogos: Deve-se ter cuidado especial ao selecionar e ajustar um aparelho auditivo quando os níveis de pressão sonora excederem 132 dB NPS, com um simulador de ouvido obstruído IEC 60711:1981. Pode haver o risco de prejudicar a audição que ainda resta
8. Desative a funcionalidade wireless usando o modo avião, em áreas onde a emissão de rádio frequência seja proibida
9. Se um aparelho auditivo estiver quebrado, não o utilize
10. Equipamentos externos conectados à rede elétrica devem ser seguros, conforme os requisitos das normas IEC 60601-1, IEC 60065, EN/IEC 62368-1, ou IEC 60950-1, quando apropriado (conexão com cabos, por ex. HI-PRO), SpeedLink)



OBSERVAÇÃO: Para o uso da funcionalidade wireless (sem fio), somente use acessórios wireless compatíveis. Para mais orientações sobre, por exemplo, a sincronização, consulte o manual do usuário do acessório wireless correspondente.



Precauções gerais

1. Quando a função wireless está ativada, o aparelho usa transmissões de baixa potência codificadas digitalmente para se comunicar com outros acessórios wireless. Embora seja pouco provável, os dispositivos eletrônicos nas proximidades podem ser afetados. Neste caso, afaste o aparelho auditivo do dispositivo eletrônico afetado
2. Use somente peças originais fornecidas pela fabricante, tais como as proteções contra cerume

3. Conecte os aparelhos auditivos apenas a acessórios destinados e preparados para o uso com os aparelhos auditivos

O que esperar dos aparelhos auditivos

O aparelho auditivo não restabelece a audição normal e não evita ou melhora um problema auditivo resultante de condições do organismo.

Recomenda-se o uso constante do aparelho auditivo. Na maioria dos casos, o uso não frequente do aparelho pode dificultar a obtenção de todos os seus benefícios.

O uso de um aparelho auditivo é apenas parte da reabilitação auditiva, precisando, às vezes, ser complementado por treinamento auditivo e instruções sobre a leitura labial.

Guia para a solução de problemas

Problema	Possível causa	Possível solução
Microfonia, "apito"	O seu molde auricular ou oliva está inserido(a) corretamente?	Coloque-o novamente
	O volume está muito alto?	Diminuir o volume
	Você está segurando um objeto (por exemplo, um chapéu, um telefone) próximo ao aparelho auditivo?	Afaste a sua mão para criar mais espaço entre o aparelho e o objeto
	Sua orelha está cheia de cerume?	Consulte o médico

Problema	Possível causa	Possível solução
Sem som	O aparelho auditivo está ligado?	Ligue-o
	O aparelho auditivo está em modo de bobina telefônica?	Ative o programa de microfone
	Há bateria no aparelho?	Insira uma bateria nova
	A bateria ainda está boa?	Substitua-a por outra
	O tubo plástico ou molde auricular está obstruído ou quebrado?	Consulte o fonoaudiólogo
	Sua orelha está cheia de cerume?	Consulte o médico
Som distorcido, confuso ou fraco	A bateria acabou	Substitua a bateria por uma nova
	A bateria está suja?	Limpe-a ou substitua-a por uma nova
	O tubo plástico ou molde auricular está obstruído ou quebrado?	Consulte o fonoaudiólogo
	Entrou umidade em seu aparelho auditivo?	Use um desumidificador

Problema	Possível causa	Possível solução
A bateria acaba muito rápido	Você deixou o seu aparelho auditivo ligado por longos períodos? A bateria está velha?	Sempre desligue o seu aparelho auditivo quando não estiver utilizando-o. Verifique a data na embalagem da bateria

Aviso aos fonoaudiólogos (Apenas EUA)

O fonoaudiólogo deverá aconselhar um potencial usuário(a) do aparelho auditivo a consultar prontamente um médico (preferencialmente um otorrinolaringologista) antes de fornecer o aparelho, caso detecte na anamnese, exame ou revisão de quaisquer outras informações disponíveis, qualquer uma das seguintes condições relativas ao usuário:

1. deformidade congênita visível ou traumática da orelha;
2. histórico de secreção do ouvido nos últimos 90 dias;
3. histórico de perda auditiva súbita ou progressiva rápida nos últimos 90 dias;
4. tontura aguda ou crônica;
5. perda auditiva unilateral súbita ou de início recente nos últimos 90 dias;
6. Gap aéreo-ósseo audiométrico igual ou superior a 15 decibéis a 500 Hertz (Hz), 1.000 Hz e 2.000 Hz.
7. evidência visível de acúmulo de cerume ou corpo estranho no canal auditivo;
8. dor ou desconforto na orelha.



Aviso importante aos futuros usuários de aparelhos auditivos (Apenas EUA)

As boas práticas de saúde exigem que uma pessoa com perda auditiva seja avaliada por um médico (preferencialmente, um especialista em doenças do ouvido) antes de adquirir um aparelho auditivo. Médicos que se especializam em doenças otológicas são frequentemente referidos como otorrinolaringologistas e otologistas. O objetivo da avaliação médica é garantir que todas as doenças possíveis de tratamento, e que possam afetar a audição, sejam identificadas e tratadas antes da aquisição do aparelho auditivo.

Após a avaliação, o médico lhe dará um atestado que diz, por escrito, que sua perda auditiva foi clinicamente avaliada e que você pode ser considerado um candidato para o uso de aparelhos auditivos. O médico lhe encaminhará para um fonoaudiólogo, conforme o caso, para uma avaliação de aparelho.

O fonoaudiólogo realizará uma avaliação com e sem aparelhos, para verificar sua capacidade de ouvir. A avaliação do aparelho auditivo permitirá que o fonoaudiólogo selecione e adeque o melhor aparelho às suas necessidades individuais.

Se tiver dúvidas quanto à sua capacidade de se adaptar à amplificação, você deve perguntar sobre a disponibilidade de experiência domiciliar com os aparelhos. Muitos fonoaudiólogos agora oferecem programas que lhe permitem utilizar um aparelho auditivo por um certo período, ao final do qual você pode decidir se quer ou não comprá-lo.

As leis federais restringem a venda de aparelhos auditivos apenas a indivíduos que obtiveram uma avaliação clínica feita por um médico autorizado. As leis federais permitem que um adulto plenamente informado assine uma declaração de desistência da avaliação clínica, por motivos de crenças religiosas ou pessoais que proíbam consultas com um médico. A prática de tal desistência não é o melhor para a sua saúde e sua utilização é veementemente contraindicada.



Crianças com perda auditiva(Apenas EUA)

Além de consultar o médico para obter uma avaliação, uma criança com perda auditiva deve ser encaminhada a um audiologista para avaliação e reabilitação, pois a perda auditiva pode causar problemas no desenvolvimento linguístico, bem como no desenvolvimento social e educacional da criança. O audiologista é o profissional capacitado e experiente para auxiliar na avaliação e reabilitação de uma criança com perda auditiva.

Informações legais

Garantias e reparos

A fabricante fornece uma garantia para os aparelhos auditivos em casos de defeito de fabricação ou de material, como descrito na documentação de garantia aplicável. Em sua política de serviços, a fabricante compromete-se a garantir a funcionalidade ao menos equivalente ao aparelho auditivo original. Como signatária da iniciativa United Nations Global Compact, a fabricante compromete-se a fazê-lo conforme as melhores práticas de defesa do ambiente. Portanto, os aparelhos auditivos, a critério da fabricante, podem ser substituídos por novos produtos ou produtos fabricados a partir de peças novas ou de reposição, ou reparados utilizando peças de reposição novas ou recondiçionadas. O período de garantia dos aparelhos auditivos está mencionado no seu cartão de garantia, que lhe é entregue pelo seu fonoaudiólogo.

Em caso de necessidade de assistência técnica dos seus aparelhos auditivos, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

Os aparelhos auditivos com problemas de funcionamento devem ser reparados por um técnico qualificado. Não tente abrir a caixa do aparelho, pois isso invalidará a garantia.

Informações do teste de temperatura, transporte e armazenamento

Nossos aparelhos auditivos são submetidos a diversos testes com variação de temperatura, calor e umidade entre -25 °C (-13 °F) e +70 °C (+158 °F) , de acordo com as normas internas e do setor.

Durante a operação normal, a temperatura não deve ultrapassar os valores -limite de 0 °C (+32 °F) a +45° C (+113 °F) e uma umidade relativa de 90% UR, sem condensar. Uma pressão atmosférica entre 500 hPa e 1100 hPa é apropriada.

Durante o transporte e armazenamento, a temperatura não deve exceder os valores-limite de -20 °C (-4 °F) a +60° C (+140 °F) e umidade relativa de 90% UR, sem condensação (por tempo limitado). Uma pressão do ar entre 500 hPa e 1100 hPa (mbar) é apropriada.

Símbolos

Esteja ciente das informações assinaladas com o símbolo de advertência:



ADVERTÊNCIA: Indica uma situação que pode conduzir a danos graves.



CUIDADO: Indica uma situação que pode conduzir a danos menores e moderados.



Conselhos e dicas sobre como manusear melhor o seu aparelho auditivo.



O equipamento inclui um transmissor de RF.



Siga as instruções de uso.



Consulte o seu fonoaudiólogo quanto ao descarte de seus aparelhos auditivos e acessórios.

OBSERVAÇÃO: Sujeito aos regulamentos específicos do país.



O produto é uma peça aplicada Tipo B.



Complies with
IMDA Standards
DA105282

Declaração

Este aparelho está em conformidade com o Item 15 das Regras do FCC e do ISED. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

1. Este aparelho não pode causar interferência prejudicial.

2. Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar o seu funcionamento indesejado.



OBSERVAÇÃO: Estes equipamentos foram testados e provaram cumprir com os limites para dispositivos digitais da Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras do FCC e do ISED. Esses limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e poderá emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado em concordância com as instruções especificadas, poderá causar interferências prejudiciais aos sistemas de comunicação por rádio. No entanto, não garantimos que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e ligando o equipamento, o(a) usuário(a) deve tentar corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena receptora.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado
- Consultar o comerciante ou um técnico de rádio/TV experiente para pedir ajuda.

Alterações ou modificações podem afetar a autonomia do usuário para operar o equipamento.

Os produtos estão em conformidade com os seguintes requerimentos legais:

- O equipamento está em conformidade com os Requisitos Essenciais, conforme o Anexo I da Diretriz do Conselho 93/42/EEC para equipamentos médicos (DEM)
- Por este documento, a GN ReSound A/S declara que os modelos de equipamento de rádio BEB80 e LOB90 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.
- O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
www.declarations.resound.com.
- Nos EUA: FCC CFR 47 Parte 15, subparte C.
- Outros requisitos regulatórios internacionais identificados e aplicáveis em países fora da UE e dos EUA. Consulte os requisitos próprios de cada país para essas áreas.
- No Canadá: estes aparelhos auditivos são certificados de acordo com as regras do ISED.
- Conformidade com a Legislação Japonesa de Rádio e a Legislação Japonesa de Empresas de Telecomunicação. Este dispositivo foi concebido de acordo com a lei de radiocomunicações japonesa (電波法) e a lei de empresas japonesas de telecomunicação (電気通信事業法). Este dispositivo não deve ser modificado (do contrário, o número de designação conferido será invalidado).

Designações de tipo

As designações de aparelho auditivo para os modelos incluídos nesse Manual do Usuário são:

BEB80, FCC ID: X26BEB80, IC: 6941C-BEB80

LOB90, FCC ID: X26LOB90, IC: 6941C-LOB90

Este dispositivo inclui um transmissor de RF que opera na faixa de frequências entre 2,4 GHz - 2,48 GHz. A potência nominal de saída de RF transmitida é de +1,1 dBm.

Modelos de aparelhos auditivos

Os aparelhos auditivos **power retroauriculares (BTE)** do tipo **BEB80** com FCC ID X26BEB80, número IC 6941C-BEB80 e bateria tamanho 13 estão disponíveis nos seguintes modelos:

EQ588-DWHT EQ788-DWHT EQ988-DWHT

A potência nominal de saída de RF transmitida é de: -2 dBm.

Os **aparelhos retroauriculares Super Power (SP BTE)** do tipo **LOB90** com FCC ID X26LOB90, número IC 6941C-LOB90 e baterias tamanho 675 estão disponíveis nos seguintes modelos:

EQ598-DWT EQ798-DWT EQ998-DWT


A potência nominal de saída de RF transmitida é de: +1 dBm.

Especificações técnicas

Retroauricular Power

Modelos: EQ588-DWHT EQ788-DWHT EQ988-DWHT

Teste de ganho de referência (entrada de 60 dBNPS)	HFA	53	dB
Ganho máximo (entrada de 50 dBNPS)	Máx HFA	73 67	dB
Saída máxima (entrada de 90 dBNPS)	Máx HFA	134 130	dBNPS
Distorção harmônica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	2,8 0,4 0,4 0,1	%
Sensibilidade da bobina telefônica (1 mA/m de entrada) HFA-NPSIVem 31,6 mA/m (ANSI) Sensibilidade total da bobina telefônica a 1 mA/m	Máx HFA HFA	103 114 98	dBNPS
Ruído equivalente de entrada, sem redução do ruído Ruído equivalente de entrada, 1/3 de oitava, sem redução do ruído		22 12	dBNPS
Faixa de frequência (DIN 45605)		100-4940	Hz
Consumo de corrente (em repouso / em operação)		1,18/1,4	mA

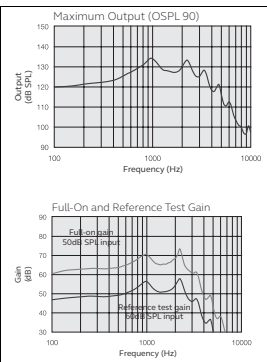


Dados de acordo com as normas ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

Super Power BTE

Modelos: EQ598-DWT EQ798-DWT EQ998-DWT

Teste de ganho de referência (entrada de 60 dBNPS)	HFA	53	dB
Ganho máximo (entrada de 50 dBNPS)	Máx HFA	83 67	dB
Saída máxima (entrada de 90 dBNPS)	Máx HFA	141 130	dBNPS
Distorção harmônica total	500 Hz	4,2	%
	800 Hz	0,5	
	1600 Hz	0,7	
	3200 Hz	0,2	
Sensibilidade da bobina telefônica (1 mA/m de entrada) HFA – NPSIV em 31,6 mA/m (ANSI) Sensibilidade total da bobina telefônica a 1 mA/m	Máx.	113	dBNPS
	HFA	113	
	HFA	98	
Ruído equivalente de entrada, sem redução do ruído		27	dBNPS
Ruído equivalente de entrada, 1/3 de oitava, sem redução do ruído		8	
Faixa de frequência (DIN 45605)		100-5200	Hz
Consumo de corrente (em repouso / em operação)		1,3/3,3	mA

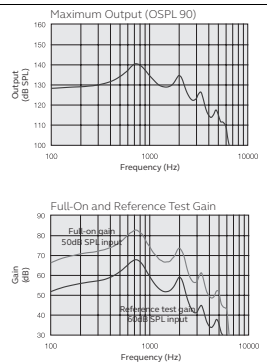

Dados de acordo com as normas ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

Informações adicionais

Créditos

Partes deste software foram desenvolvidas por Kenneth MacKay (micro-ecc) e licenciadas de acordo com os seguintes termos e condições:

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Todos os direitos reservados.

É permitida a redistribuição e o uso nas formas fonte e binárias, com ou sem modificação, contanto que as seguintes condições sejam atendidas:

* As redistribuições do código fonte devem reter o aviso acima sobre direitos autorais, esta lista de condições e o termo de responsabilidade a seguir.

* As redistribuições na forma binária devem reproduzir, na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição, o aviso acima sobre direitos autorais, esta lista de condições e o termo de responsabilidade a seguir.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E CONTRIBUIDORES NA FORMA "EM QUE SE ENCONTRA", SENDO QUE QUAISQUER GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ESTANDO EXIMIDAS AS ADEQUAÇÕES A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. EM HIPÓTESE ALGUMA O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS OU OS CONTRIBUIDORES

SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU IMPREVISTOS (INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR À AQUISIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS, LUCROS CESSANTES, PERDAS DE DADOS OU DE RENDIMENTOS; OU INTERRUÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DE COMO FORAM CAUSADOS E EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS), ORIUNDOS DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE NOTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.



A utilização da marca Made for Apple significa que um acessório foi projetado para ser conectado especificamente aos modelos de iPhone, iPad e iPod touch e que foi certificado pelo desenvolvedor para atender às normas de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo nem pela conformidade com as normas regulamentares e de segurança.

© 2020 GN Hearing A/S. Todos os direitos reservados. ReSound é marca registrada da GN Hearing A/S. Apple, o logotipo Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Android, Google Play e o logotipo da Google Play são marcas registradas de Google LLC. A palavra e o logotipo Bluetooth são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc.



Complies with
IMDA Standards
DA105282

Observações:

Observações:

Observações:

Fabricante de acordo com
a Diretriz 93/42/CEE da UE
sobre Dispositivos
Médicos:

Sede Internacional

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
CEP.: +45 4575 1111
resound.com
CVRno. 55082715

Espanha

GN Hearing Care S.A.U
Poligono Industrial Prado Overa
C./Puerto de la Morcuera, 14-16
ES-28919 Leganés (Madrid)
Tfno.: +34 91 428 22 10
resound.es

Brasil

GN ReSound Ltda.
Rua do Paraíso, 139 - 6ª, 7ª, 8ª e 9ª
andares
CEP: 04103-000 São Paulo
Tel.: +55 11 3016 8350
resound.com
faleconosco@gnresound.com.br



0297

Quaisquer assuntos relativos à Diretriz Europeia 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos, ou à Diretriz Europeia 2014/53/UE sobre Equipamentos de Rádio devem ser dirigidos à GN ReSound A/S.