



ReSound GN

ReSound Remote Control 2

GUÍA DEL USUARIO

GN Making Life Sound Better

Bienvenido

Enhorabuena por adquirir ReSound Unite™ Remote Control 2.

Remote Control 2 le permitirá manejar sus audífonos inalámbricos ReSound. Es a la vez un mando a distancia elegante y fácil de usar, y un lector de estado que le permite acceder a las funciones inalámbricas de sus audífonos.

Remote Control 2 se puede usar para ajustar sus dos audífonos al mismo tiempo. O puede controlar ambos audífonos individualmente, lo que le permite ajustarlos perfectamente a cualquier situación auditiva específica.

Lea cuidadosamente el manual para beneficiarse plenamente de Remote Control 2. Consulte a su audioprotesista si tiene dudas.

Para obtener más información también puede visitar

www.declarations.resound.com

Por su seguridad, lea cuidadosamente el capítulo Información Importante, páginas 31-35.

FCC ID: X26RC-2

Declaración

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 15 de las normas FCC.

- (1) este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales y
- (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento del mismo.

Nota: Este equipo ha superado las pruebas que lo sitúan dentro de los límites de un aparato digital de clase B conforme al apartado 15 de las normas FCC. Dichos límites ofrecen una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía en forma de radiofrecuencia y si no se instala según las especificaciones puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones.

No se ofrece garantía alguna de que no puedan producirse interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual podrá determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que utilice los siguientes métodos para eliminar las interferencias:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y TV.

Los cambios o modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para manipular el equipo

Uso previsto

El Mando a Distancia 2 tiene por objeto permitir que el usuario tenga control remoto de un audífono inalámbrico ReSound. El funcionamiento esencial de ReSound Control 2 es transmitir señales a los audífonos inalámbricos de ReSound para ajustar el volumen y los programas.

Este producto cumple con las siguientes regulaciones:

En la UE: el dispositivo se ajusta a los requisitos esenciales de conformidad con el anexo I de la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios (MDD).

GN Hearing A/S declara que los tipos de equipo radioeléctrico RC-2 cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: declarations.resound.com

En EE.UU.: FCC CFR 47 apartado 15, subapartado C

En Canadá: estos audífonos están certificados según las normas ISED.

Otros requisitos pueden ser aplicables según la legislación vigente en países fuera de la UE y los EE.UU. Consulte los requisitos locales en dichas áreas.

IC: 6941C-RC2

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 15 de las normas FCC e las normas de ISED.

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 15 de las normas FCC e ISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un mal funcionamiento del mismo.

En JP:


En Japón, este dispositivo dispone de un número de designación asignado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones en "Ordenanza relativa a la conformidad de los reglamentos técnicos, etc. Certificación de Equipos de Radio Específicos (特定無線設備の技術基準適合証明 等に関する規則) “ Artículo 2-1-19 “Este dispositivo no debe ser modificado (de lo contrario el número de designación otorgado dejará de ser válido)”

Índice


Descripción.....	8
Primeros pasos.....	16
Ajustar el volumen.....	12
Volver a la configuración inicial.....	14
Indicador de pila agotada	15
Rango operativo	17
Visualización en pantalla.....	18
Funcionamiento del Mando a Distancia 2	18
Emparejamiento.....	19
Uso de dispositivos de transmisión de audio opcionales.....	21
Activar la transmisión desde ReSound Unite™ Transmisor de TV ...	22
Ajuste del volumen en modo de transmisión	24
Teléfono (opcional)	27
Apéndice: excepciones al normal funcionamiento.	28
Información importante.....	31
Especificaciones técnicas.....	36
Garantía	37
Guía de solución de problemas	40
Notas	46

Descripción

- 1 Interruptor de encendido/apagado
- 2 Pantalla
- 3 Transmisor (Transmisor de TV o Mini Micro opcional)
- 4 Inicio
- 5 Botón para silenciar el micrófono del audífono

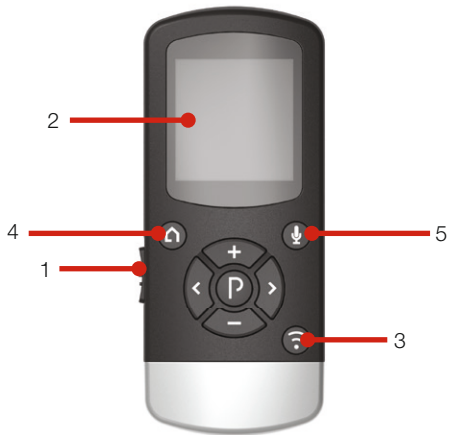

- 6 Aumentar el volumen
- 7 Disminuir el volumen
- 8 Seleccionar solo el audífono izquierdo
- 9 Seleccionar solo el audífono derecho
- 10 Cambiar programa
- 11 Emparejamiento

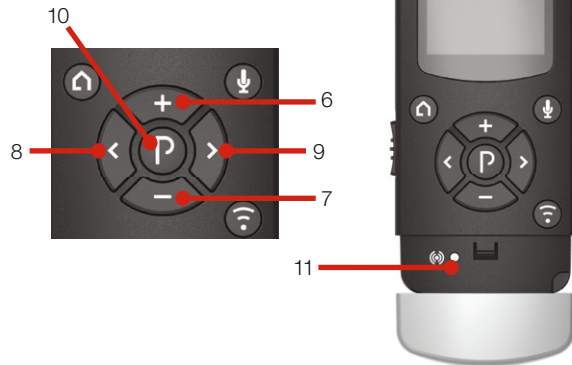

Primeros pasos

Carga de la batería

Antes de utilizar el Mando a Distancia 2 es necesario cargar completamente la batería. Para cargarla, conecte el cable como muestra la ilustración siguiente. A continuación, enchufe el otro extremo del cable a una toma de corriente. Durante la carga, el indicador de la batería muestra una, dos y tres barras de forma continua. Cuando está completamente cargado, se muestran tres barras.



Encender y apagar el Mando a Distancia 2

Para encender el Mando a Distancia 2 coloque el interruptor en la posición ON (1 en la página 8) Un icono "I" blanco quedará visible en la base del interruptor y se encenderá el testigo luminoso.

Para apagarlo, deslice el conmutador ON/OFF a la posición OFF.




No recargue Remote Control 2 cuando lo lleve puesto.

Cambiar de programa

El botón "P" (10 en la página 9) se usa para cambiar los programas que el audioprotésista haya programado en sus audífonos. El audioprotésista puede configurar el nombre del programa mostrado. Cada vez que pulse el botón "P" el programa avanza un paso, volviendo al programa 1 al final de cada ciclo (por ejemplo 1, 2, 3, 1). Cada cambio en el programa está indicado por medio de tonos en los audífonos (si no los desactivó el audioprotésista) y se mostrará en la pantalla el programa actualmente en uso. Para un rendimiento óptimo se recomienda que ambos audífonos estén configurados en el mismo programa.



Programa 1 "Básico"

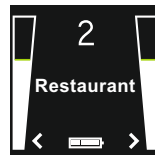

Programa 2
"Restaurante"

Ajustar el volumen


Ajustar el volumen en ambos audífonos

Las teclas "+" y "-" se usan para ajustar el volumen. Se puede ajustar el volumen en ambos audífonos simultáneamente o en cada uno independientemente. De forma predeterminada, ambos audífonos están "activos", lo cual se indica en la pantalla con dos flechas (< y >) ubicadas junto a las barras de volumen. Se puede subir el volumen de ambos audífonos simultáneamente pulsando la tecla "+" o bajarlo pulsando la tecla "-". Cada ajuste está indicado con pitidos en los audífonos (si no los desactivó el audioprotésista durante el ajuste) y también se mostrarán cambios en las barras de volumen de la pantalla. El nivel de volumen predeterminado se indica mediante una línea verde horizontal en las barras de volumen.




Ajustar el volumen solo en el audífono izquierdo

Para ajustar el volumen solo en el lado izquierdo, pulse primero la tecla "<" del teclado (8 en la página 9). De este modo, se "activa" el audífono izquierdo y se "desactiva" el derecho. Esto se indica mediante una flecha izquierda (<) en la pantalla, la flecha derecha apagada y una barra de volumen atenuada en el lado derecho. Ahora pulse "+" o "-" para ajustar el volumen solo en el audífono izquierdo.

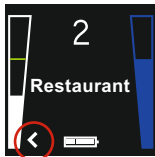

Ajustar el volumen solo en el audífono derecho

Para ajustar el volumen en el lado derecho sólo, pulse primero la tecla ">" del teclado (9 en la página 9). De este modo, se "activa" el audífono derecho y se "desactiva" el izquierdo. Esto se indica mediante una flecha derecha (>) en la pantalla, la flecha izquierda apagada y una barra de volumen atenuada en el lado izquierdo. A continuación, pulse "+" o "-" para ajustar el volumen para el audífono derecho sólo.

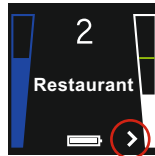



Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse la tecla < o > del teclado (8 o 9 en la página 9) hasta que ambas flechas aparezcan en la pantalla, indicando que ambos audífonos están otra vez "activos".



Nota: Si la sincronización de dispositivo a dispositivo está activada en los audífonos, el ajuste de volumen individual puede realizarse automáticamente a través de los audífonos izquierdo y derecho.

Desactivar / activar (no disponible con audífonos Alera)

Puede activar y desactivar los micrófonos del audífono con el botón de silencio (5 en la página 8) en Remote Control 2. Silenciar o desactivar el silencio se aplica a ambos audífonos al mismo tiempo y no se puede seleccionar para el audífono izquierdo o derecho por separado.

Cuando los micrófonos están silenciados, el icono de micrófono  será reemplazado por un icono de micrófono silenciado  y las barras de volumen se atenúan. Para activar el sonido de los micrófonos de los audífonos, pulse de nuevo el botón de silencio.

Activar la transmisión

Si está utilizando un dispositivo de transmisión de ReSound como Transmisor TV o Mini Micro, la entrada de estos dispositivos se puede activar pulsando el botón de transmisión (3 en la página 8). También puede consultar el capítulo Uso de dispositivos de transmisión de audio opcionales.

Volver a la configuración inicial

La configuración inicial, por ejemplo, la que se aplica cada vez que se encienden los audífonos, se activará pulsando el botón Inicio (4 en la página 8). Al pulsar el botón Inicio:

- a. Se activará el programa 1 en ambos audífonos
- b. Ambos audífonos volverán a los ajustes de volumen predefinidos
- c. Se establecerá el volumen en el modo de ajuste simultáneo

El botón Inicio también finalizará cualquier transmisión de señal de audio procedente de dispositivos ReSound.

Indicador de batería baja

Indicador de batería baja de Remote Control 2

El nivel de la batería de Remote Control 2 se indica mediante un medidor de batería con tres barras. A medida que la batería se agota, las barras van desapareciendo. Cuando la batería tiene poca carga, el medidor de carga de la batería comenzará a parpadear para indicar que es necesario recargarla.



Batería baja de
Remote Control 2

Indicador de batería baja del audífono

Cuando los audífonos están agotando la batería, se mostrará en la pantalla del Mando a Distancia 2, al lado de la barra de volumen. Las flechas que indican el audífono izquierdo (<) o el derecho (>) se alternarán entre la flecha y un icono vertical de batería que indica que el audífono (izquierdo o derecho) se está quedando sin energía.



Batería baja en el audífono izquierdo





Batería baja en el audífono derecho


Mientras la batería está baja se suspenden las funciones de Remote Control 2 y otras operaciones inalámbricas. El tiempo restante de duración de la batería depende del tipo de audífono y del modo de operación, por lo que se recomienda poner baterías nuevas cuando aparezca la indicación de batería baja para reanudar el funcionamiento completo de los audífonos.

Alcance


El alcance del Mando a Distancia 2 y el de los audífonos es de aproximadamente 100 cm. En el caso de que no pueda leer Remote Control 2, manténgalo en frente del pecho, como se muestra en la imagen.

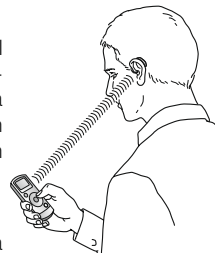

En el caso de que el Mando a Distancia 2 no pueda leer el estado de los audífonos, aparecerán iconos de búsqueda en el Mando a Distancia 2.  Mantenga el Mando a Distancia 2, como se muestra arriba para establecer contacto con ambos audífonos.

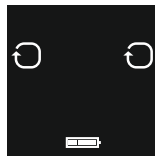

Buscando ambos audífonos

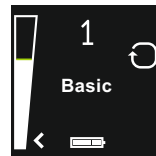

Conectado con el audífono izquierdo y buscando el audífono derecho

Visualización en pantalla

Para conservar la vida de las pilas, el Mando a Distancia 2 tiene una función de espera que apaga automáticamente la pantalla después de 20 segundos de inactividad. Cuando la pantalla esté oscura, pulse simplemente cualquier botón del teclado para encender la pantalla y a continuación realice la acción deseada.

Funcionamiento del Mando a Distancia 2

El Mando a Distancia 2 funciona mejor cuando se pulsan los botones una vez en cada paso en lugar de una secuencia rápida. Para ajustar el volumen, por ejemplo, pulse brevemente un botón y espere un instante hasta que oiga los pitidos antes de continuar. Este consejo se puede aplicar al uso de cualquier botón, pero es especialmente pertinente en ajustes de volumen.


**Tenga en cuenta que el audioprotesista puede haber desactivado los tonos durante el ajuste*

Emparejamiento

Nota: La siguiente información está destinada al audioprotesista, quien en la mayoría de los casos realizará las tareas necesarias para que usted pueda utilizar el Mando a Distancia 2 con sus audífonos. Sin embargo, el proceso diseñado es sencillo y lo puede realizar cualquiera.

El emparejamiento es el proceso de establecer una comunicación exclusiva entre los audífonos y el Mando a Distancia 2. Su audioprotesista puede realizar el emparejamiento durante la adaptación de los audífonos. Alternativamente, usted puede realizar los siguientes pasos para emparejar los audífonos con Remote Control 2:

1. Asegúrese de que el Mando a Distancia 2 está totalmente cargado y encendido. Los audífonos tienen que estar apagados-deje abiertos los portapilas.
2. Pulse una vez en el Mando a Distancia 2 el botón de emparejamiento (11 en la página 9). Esto activará el modo de emparejamiento durante 20 segundos.

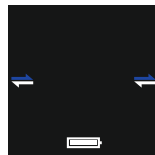

Buscar los audífonos

3. Mientras esté activado el modo emparejamiento, cierre los portapilas de ambos audífonos y asegúrese de que están encendidos. Cuando se haya realizado el emparejamiento oírás una melodía audible en ambos audífonos y en la pantalla del Mando a Distancia 2 se activarán las barras de volumen y el programa "1" (véase más adelante). Ya puede utilizar el Mando a Distancia 2.



Audífonos en el programa 1

Uso de dispositivos de transmisión de audio opcionales

ReSound Transmisor TV™ y Mini Micro™ son dispositivos opcionales de transmisión de audio y voz disponibles para sus audífonos.

El transmisor TV transmite las señales de audio de su televisor, equipo de música, ordenador, etc. directamente a sus audífonos.

Mini Micro transmite el habla y las señales de audio directamente a sus audífonos.

Para iniciar la transmisión de audio desde Transmisor TV o Mini Micro, pulse el botón de transmisión (3 en la página 8) del Mando a Distancia 2. Los audífonos iniciarán la búsqueda del dispositivo de transmisión.



Activar la transmisión desde ReSound Unite™ TV Streamer

Para iniciar la transmisión de audio desde el televisor, equipo de música u otro dispositivo conectado a TV Streamer, simplemente encienda el dispositivo de audio y, a continuación, pulse el botón de transmisión (3 en la página 8). Los audífonos comenzarán inmediatamente a buscar TV Streamer y se conectarán a él.



Buscando la TV



Conectado a la TV



No se encuentra la TV

Se pueden configurar hasta 3 dispositivos de transmisión por audífono. Cada dispositivo de transmisión se indica en la pantalla mediante una letra: A, B o C. Si usa más de un dispositivo de transmisión, pulse el botón de transmisión hasta escuchar la señal de audio que desea.

Ajuste del volumen en modo de transmisión

(Funcionalidad limitada para audífonos ReSound Alera inalámbricos. Consulte la sección "Ajuste del volumen en modo de transmisión".)

Cuando está en el modo de transmisión, tanto el volumen de los audífonos (barra de volumen a la izquierda) como el volumen del audio transmitido (barra de volumen a la derecha) están en el ajuste predeterminado "activo". Esto se indica en la pantalla con dos flechas (< y >) ubicadas junto a las barras de volumen. Para ajustar al mismo tiempo el volumen del audífono y del audio transmitido, pulse la tecla "+" o la tecla "-" (6 o 7 en la página 9) de Remote Control 2.

Nota: Si tiene dos audífonos, los cambios de volumen se aplican a ambos audífonos al unísono.


También es posible hacer ajustes de volumen individuales para los audífonos y la señal de audio transmitida respectivamente.

Ajuste del volumen del audífono (sólo)

Para ajustar el volumen del audífono, pulse la tecla "<" del teclado (8 en la página 9). Verá dos flechas "<>" al lado de la barra de volumen del audífono y de la barra de volumen del audio transmitido que permiten regular el volumen.

Pulse el botón "+" o "-" (6 o 7 en la página 9) para ajustar el volumen del audífono.

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse la tecla ">" del teclado (9 en la página 9) hasta que la flecha aparezca en la pantalla al lado de cada barra de volumen, indicando que ambos audífonos están otra vez "activos".

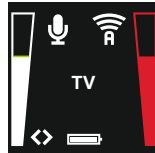


Ajuste del volumen del audio transmitido (sólo)

Para ajustar el volumen del audio transmitido, pulse la tecla ">" del teclado (9 en la página 9). Verá dos flechas "<>" al lado de la barra de volumen del audio transmitido que permiten regular el volumen.

Pulse el botón "+" o "-" (6 o 7 en la página 9) para ajustar el volumen del audio transmitido.

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse la tecla "<" del teclado (8 en la página 9) hasta que la flecha aparezca en la pantalla al lado de cada barra de volumen, indicando que ambos audífonos están otra vez "activos".

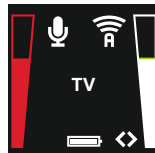

Ajuste del volumen en modo de transmisión de Resound Alera

Si dispone de audífonos inalámbricos Resound Alera, los cambios de volumen se aplican solo a la señal de audio transmitida.

Si es necesario, utilice las teclas "+" y "-" (6 o 7 en la página 9) para ajustar el volumen. El volumen de la señal del audio transmitido también se puede ajustar individualmente para el audífono izquierdo o derecho pulsando < o > (8 o 9 en la página 9).

Para detener la transmisión y regresar al programa anterior, pulse el botón "P" (10 en la página 9).

Teléfono (opcional)

ReSound Unite™ Phone Clip+ o PhoneNow™ también funcionan con Remote Control 2. Cuando utilice Phone Clip + o PhoneNow se indicará en la pantalla:

Una vez que la llamada haya terminado, el audífono volverá al programa utilizado anteriormente. Dicho programa se muestra en la pantalla de Remote Control 2. Los ajustes de volumen realizados durante la llamada telefónica no se transferirán al programa utilizado anteriormente.



Las llamadas telefónicas interrumpen temporalmente la transmisión de los dispositivos de transmisión opcionales pero la transmisión de audio se restablecerá una vez que la llamada ha terminado.

Apéndice: excepciones al normal funcionamiento

Se recomienda que ambos audífonos estén siempre configurados en el mismo programa. Sin embargo, es posible tener diferentes programas en los dos audífonos, como el programa 1 en el lado izquierdo y la transmisión de audio en el derecho. En condiciones como éstas, Remote Control 2 funciona ligeramente diferente, como ilustran los ejemplos siguientes.

Situación nº1: Ha comenzado con el programa 1 en ambos lados pero ha cambiado el lado derecho al programa 2 usando el pulsador del audífono derecho. Si ahora pulsa el botón "P" de Remote Control 2, el audífono izquierdo avanzará al programa 2, igual que el derecho. Si pulsa más veces el botón "P" avanzarán ambos audífonos, manteniendo el mismo programa en ambos.

Situación nº 2: Ha establecido el audífono izquierdo en el programa 1 y el derecho en el programa 2. Si ahora pulsa el botón de transmisión, ambos audífonos recibirán audio transmitido de la misma fuente (por ejemplo, el televisor). Si ahora pulsa el botón "P", la transmisión se cancelará en ambos lados y ambos audífonos volverán a sus programas anteriores (programas 1 y 2).

Situación nº 3: Tiene el programa 1 en el lado izquierdo, pero ha iniciado la transmisión en el lado derecho usando el pulsador del audífono derecho. Si pulsa el botón "P", el audífono derecho volverá al programa anterior y el audífono izquierdo avanzará al siguiente programa. Si vuelve a pulsar el botón "P" ambos audí-

fonos adoptarán el mismo programa.

Si en su lugar, ahora pulsa el botón de transmisión, ambos audífonos se configurarán en el mismo programa de transmisión de audio.

Situación nº 4: Ambos audífonos están configurados en el programa 1 pero está usando PhoneNow en el lado izquierdo. Si durante la llamada pulsa el botón "P", el lado derecho avanzará al programa 2 pero esto no interrumpirá la llamada. Después de la llamada, el lado izquierdo se quedará en el programa 1. Si en su lugar, pulsa el botón de transmisión durante la llamada, se iniciará la transmisión en el lado derecho sólo, permitiendo a su vez continuar la llamada en el lado izquierdo.

Situación nº 5: Se ha usado el botón de transmisión para iniciar la transmisión de audio en ambos lados, pero usted está usando la característica PhoneNow en el lado izquierdo. Si durante la llamada pulsa el botón "P", se cancelará la transmisión en el lado derecho, pero esto no interrumpirá la llamada. Si en su lugar, pulsa el botón de transmisión durante la llamada, la transmisión en el lado derecho avanzará al siguiente programa de transmisión en el lado derecho sólo, permitiendo a su vez continuar la llamada.

Situación nº 6: Si sus audífonos se encuentran en diferentes programas, sólo se muestran los números de programa para cada audífono. No se mostrará el nombre ni la etiqueta de ningún programa.

Situación nº 7: Si un audífono está en el modo de transmisión y el otro en uno de los programas, se mostrará sólo la pantalla de transmisión sin ninguna indicación del nombre o el número de programa de los audífonos.

Información importante

Cuidados y mantenimiento

- Limpie Remote Control 2 con un paño húmedo. Nunca utilice productos de limpieza (detergente, jabón, etc.) ni alcohol para limpiar el dispositivo.
- Proteja Remote Control 2 de la humedad excesiva (baño, ducha) y del calor (radiador, o salpicadero del coche). Protéjalo de los golpes y las vibraciones.

Advertencias generales

- Mantenga Remote Control 2 fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- Remote Control 2 utiliza transmisiones codificadas digitalmente para comunicarse con otros dispositivos inalámbricos. Aunque es poco probable, otros dispositivos electrónicos cercanos pueden verse afectados. En ese caso, desplace Remote Control 2 lejos del dispositivo electrónico afectado.
- Cuando utilice Remote Control 2 y el dispositivo se vea afectado por una interferencia electromagnética, apártese de la fuente.

Precauciones generales



- Los audífonos y el Mando a Distancia 2 se han emparejado exclusivamente durante la adaptación. Así se garantiza que Remote Control 2 no afectará a los audífonos que utilicen otras personas.
- Los equipos electrónicos de alta tensión, las instalaciones eléctricas de gran tamaño y las estructuras metálicas pueden reducir significativamente el rango operativo.
- Use únicamente recambios originales de ReSound.
- No modifique ni altere el Mando a Distancia 2.
- Abrir el Mando a Distancia 2 podría dañarlo. Si se presentan problemas que no pueden resolverse siguiendo las instrucciones en la sección de solución de problemas de esta guía, consulte a su audioprotesista.
- El Mando a Distancia 2 solo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- No utilice Mando a Distancia 2 en las zonas en las que la transmisión por radio frecuencia está prohibida, como los aviones.
- Sólo conecte Mando a Distancia 2 a las conexiones para las que está diseñado.

CUIDADO DE LA BATERÍA INTEGRADA:



Por favor, tenga en cuenta que el producto contiene una batería

- Su producto se alimenta de una batería recargable.
- El pleno funcionamiento de una nueva batería se consigue únicamente después de tres ciclos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente se desgastará.
- Desenchufe el cargador del enchufe y del producto cuando no lo esté utilizando.
- Si lo deja sin usar, una batería completamente cargada perderá la carga a lo largo del tiempo.
- Dejar el producto en lugares calientes, como un coche cerrado, clima de verano, reducirá la capacidad y la durabilidad de la batería.
- Un producto con una batería fría puede no funcionar temporalmente, incluso aunque esté plenamente cargado. El funcionamiento de la batería es muy limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación.

Información de advertencia de la batería



- "Cuidado"- la batería utilizada en este producto puede correr riesgo de incendio o de quemado químico si se trata mal.
- No intente abrir el producto ni sustituir la batería.
- Está integrada y no se puede sustituir. El uso de otras baterías puede presentar riesgo de incendio y explosión y quedará anulada la garantía.
- La batería en su producto no puede sustituirse ni retirarse por el usuario. Cualquier intento de hacerlo es arriesgado y puede resultar en daños al producto.
- Recargue Remote Control 2 sólo con la fuente de alimentación suministrada con el producto.
- Deseche el producto según las regulaciones locales. Recible cuando sea posible.
- No tire la batería a la basura de casa ni al fuego porque puede explotar.
- Las baterías puede explotar si está dañada.

Mantenimiento del cargador



Por favor tenga en cuenta si el producto se proporciona con un cargador

- No intente cargar el producto con ninguno otro dispositivo

distinto al adaptador incluido. El uso de cualquier otro tipo podría dañar el producto y resultar peligroso.

- El uso de otros cargadores puede invalidar la aprobación o la garantía.
- Para conocer la disponibilidad de las características aprobadas, consulte a su audioprotesista.
- Cargue el producto según las instrucciones proporcionadas por el proveedor.

Información de advertencia del cargador



- Cuando desconecte el cable de alimentación o cualquier otro, tire directamente del enchufe, no del cable.
- Nunca utilice un cargador que esté dañado.
- No intente desmontar el cargador pues puede exponerle a una peligrosa descarga eléctrica.
- El montaje incorrecto puede causar descarga eléctrica o incendio en usos posteriores.
- Evite cargar el producto en temperaturas extremadamente altas o bajas y no utilice el cargador en el exterior ni en zonas húmedas.

Especificaciones técnicas

Alcance de hasta	3 metros
Inalámbrico:	2,4 GHz
Temperatura de funcionamiento:	de 0 a 45 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 a 45 °C

Prueba de temperatura, transporte y almacenamiento

El producto se somete a diferentes pruebas de temperatura y ciclos de calor húmedo de entre -25 °C y 70 °C según los estándares internos y de la industria.

Garantía

ReSound Unite™ del Mando a Distancia 2 está cubierto por una garantía limitada extendida por el fabricante durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra original. Puede ser que en su país se apliquen extensiones de garantía. Pregunte a su audioprotesista.

¿Qué cubre la garantía?

Cualquier componente eléctrico, que debido a su acabado, fabricación o diseño no funcione apropiadamente en el uso normal durante la vida de la garantía será sustituido o reparado sin cargo de las partes ni de la mano de obra cuando se devuelva al punto de compra.

Si se determina que la reparación no es posible, toda la unidad podría ser sustituida con una unidad equivalente bajo mutuo acuerdo entre el audioprotesista y el cliente.

¿Qué no cubre la garantía?

Los problemas que surjan de un mal manipulado o cuidado, uso excesivo, accidentes, reparaciones realizadas por un tercero no autorizado, exposición a condiciones corrosivas o daños debidos a objetos externos introducidos en el aparato, no quedan cubiertas por la garantía y pueden invalidarla. La garantía no afecta los derechos legales que pueda tener al amparo de la legislación nacional aplicable en lo relativo a la venta de productos de consumo. El audioprotesista puede haber emitido una garantía adicional que vaya más allá de las cláusulas de esta garantía limitada. Consulte con el audioprotesista para obtener más información.

Número de serie: _____

Fecha de la compra: _____

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>La pantalla permanece apagada cuando se pulsa una tecla de Remote Control 2</i>	Remote Control 2 está apagado La batería de Remote Control 2 está agotada	Encienda Remote Control 2 deslizando el interruptor a la posición ON Recargar la batería
<i>Ninguna información se muestra en la pantalla una vez encendido</i>	Remote Control 2 y los audífonos no se han emparejado	Realice el proceso de emparejamiento
<i>Se pulsa el botón de sincronización de Remote Control 2 pero el icono de "búsqueda" en la pantalla no es sustituido por el estado del audífono</i>	Remote Control 2 y los audífonos no están en el rango inalámbrico Remote Control 2 y los audífonos no están simultáneamente en modo de emparejamiento	Asegúrese de que Remote Control 2 y los audífonos están dentro del rango inalámbrico y repita el proceso de emparejamiento Repita el proceso de emparejamiento y asegúrese de que los portapilas de ambos audífonos se cierran en los 20 segundos subsecuentes a haber pulsado el botón de emparejamiento de Remote Control 2

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>El icono de "búsqueda" de Remote Control 2 se muestra constantemente</i>	Remote Control 2 y los audífonos no están en el rango inalámbrico	Asegúrese de que Remote Control 2 y los audífonos están dentro del rango inalámbrico
	El audífono no tiene alimentación	Encienda el audífono
	La batería del audífono está agotada	Sustituya la pila del audífono por una nueva
<i>Dos números o iconos de programas diferentes se muestran en la pantalla</i>	Los dos audífonos no están en el mismo programa. Esto puede ser por varias razones, por ejemplo, que uno de los audífonos no estaba dentro del rango inalámbrico cuando se le dio una orden desde el Remote Control 2, o porque ha cambiado el programa en uno de los audífonos pulsando el botón	Alinear el programa de los audífonos con Remote Control 2 o con el botón del programa en el audífono
		<i>Nota:</i> Debido a un esquema de prioridad interna, este comando no tendrá ningún efecto en un audífono fuera del programa de teléfono (se muestra un icono de teléfono en la pantalla de Remote Control 2)

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>Al cambiar el volumen en los audífonos con el botón "+" o "-", el volumen no cambia en un audífono</i>	El control de volumen se activa para un solo audífono (es decir, sólo se muestra una de las flechas "<" o ">" en la pantalla de Remote Control 2)	Pulse el botón "<" o ">" correspondiente para activar el control de volumen en el otro audífono

Preste atención a la información que contenga un símbolo de advertencia



ADVERTENCIA indica una situación que podría resultar en serios daños,

PRECAUCIÓN indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves y moderadas.



Asesoramiento y consejos sobre cómo manejar su accesorio ReSound Unite .



El equipo incorpora un transmisor de radiofrecuencia.

La potencia nominal de salida de RF transmitida es de 3,4 dBm.



Este producto está clasificado como Tipo B.



Pregunte a su audioprotesista cómo desechar sus accesorios ReSound.

© 2018 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca registrada de GN Hearing A/S.

Fabricante según la Directiva
93/42/CEE de la UE sobre
dispositivos médicos:

Fabricante

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tfno.: +45 4575 1111
resound.com

Distribuidor en España

GN Hearing Care S.A.U
Poligono Industrial Prado Overa
C./Puerto de la Morcuera, 14-16
ES-28919 Leganés (Madrid)
Tfno.: +34 91 428 22 10
resound.es

Nº CVR 55082715



Todas las cuestiones relacionadas con la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre dispositivos médicos o la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos deben dirigirse a GN Hearing A/S.

